

取扱説明書



ライトフェイシャル・ライトフェイシャル2型

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。




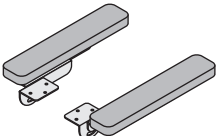
区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	ベッドの乗り降りの際、手置きに負荷をかけないでください。転落・破損の原因となります。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

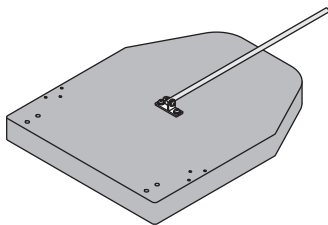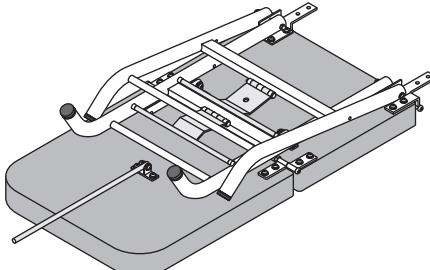部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	背部シート	1		本体シート	1
	脚部接続バー	2		手置き部	※左右各1

※ライトフェイシャル2型のみ


ネジ(大)	ネジ(中)	ネジ(小)	鍋セムス	平ワッシャー	Sワッシャー	袋ナット	ゴムキャップ	スパナ
								
2	2	4	※6	8	8	4	2	1

※ライトフェイシャル2型のみ


組立方法

● 組立時間：約 20 ～ 40 分 ※組立時、プラスドライバーが必要です。


①下図のように本体シートと背部シートを取り付けてください。

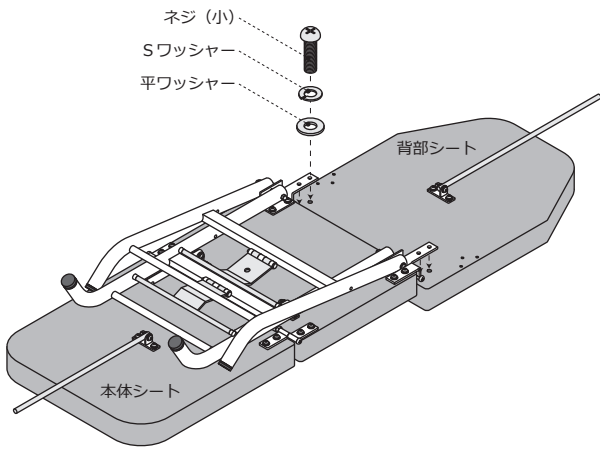


②下図のように、脚部 A・脚部 B を立ち上げてください。

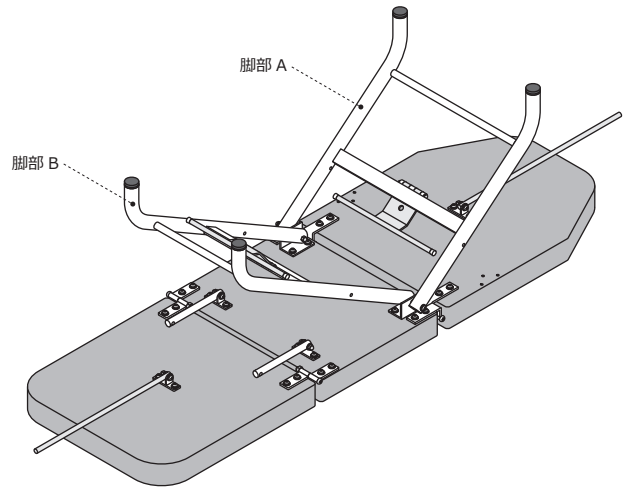

③下図のように、脚部接続バーで脚部 A・脚部 B・部品 A を固定してください。(合計 4 カ所)

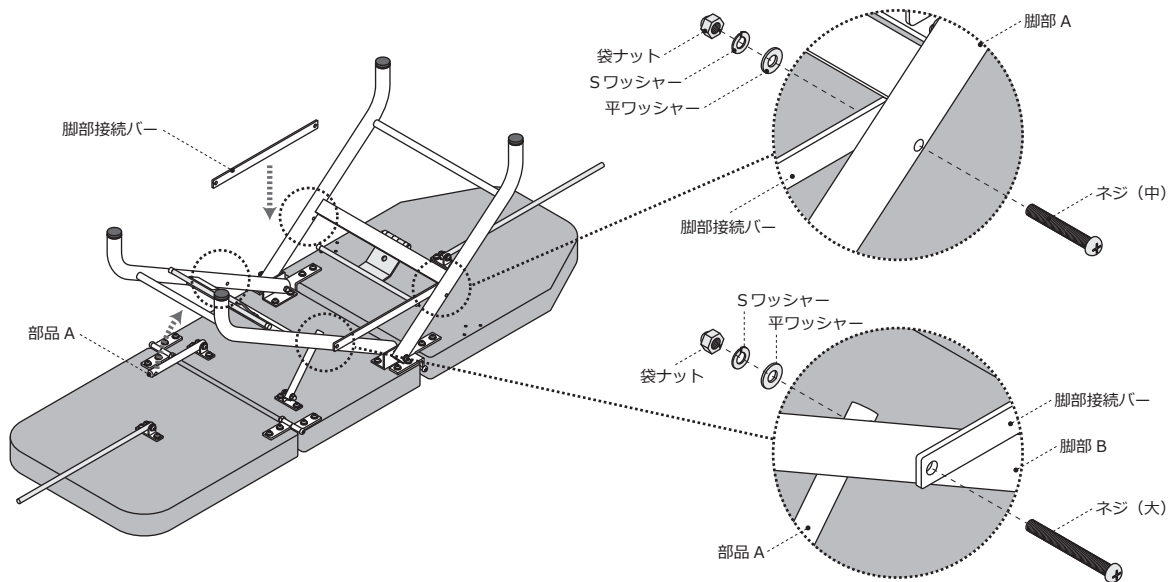


④ベッドを起し、右下図のように AL レバーの穴に丸棒を通してください。
その後、丸棒の先端にゴムキャップをしっかりと差し込んでください。
※安全にご使用いただくため、ゴムキャップは一度装着すると、抜けにくい構造となっております。

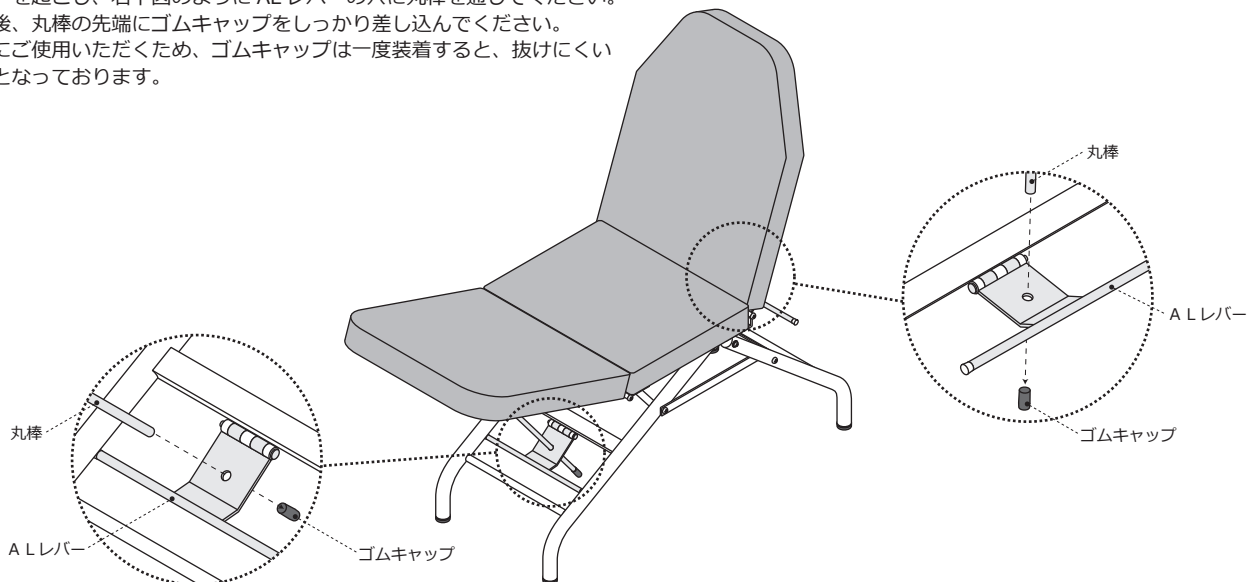


手置き部の取付方法

※ライトフェイシャル 2 型のみ

下図のように、手置き部を背部シートに取り付けてください。(合計 6 ヶ所)

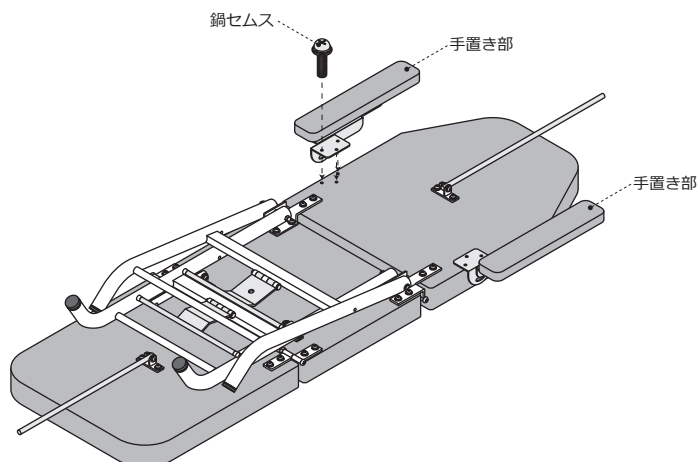


A L 式の角度調節方法

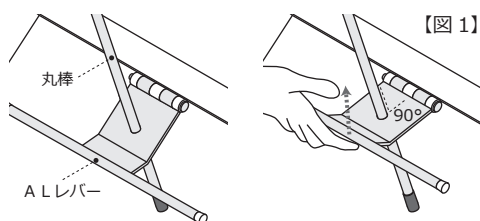

【図 1】

背部または脚部座シートを片手で支えながら、【図 1】のように A L レバーの真ん中を持ち、丸棒と垂直になるまで引き上げてください。ロックが外れ角度調節ができるようになります。

※人を乗せた状態での操作はお避けください。
※必ず、背部または脚部座シートを支えながら操作してください。座シートが急に倒れて事故・けがの原因となります。

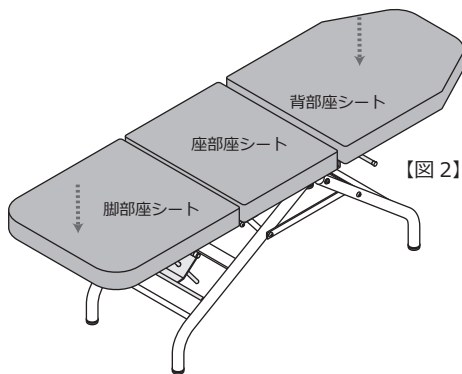

【図 2】

背部または脚部座シートをご希望の角度に調節後、A L レバーを離すと自然に A L レバーが下がりロックがかかります。背部または脚部座シートを軽く押し、しっかりとロックがかかっている事を確認してからご使用ください。【図 2】

※ベッドが平らに近い状態で端の方に乗ると、ベッドが転倒し非常に危険です。
※脚部座シートからの乗降は絶対にしないでください。脚部座シートのロック力が低下し、転倒や事故の原因となります。

△ ご注意ください。

A L レバーは長年ご使用すると、丸棒を差し込んでいる穴が広がり、ロック力が低下します。ロック力が低下したままご使用を続けると、事故やけがの原因となりますので、ご購入いただいた販売店様を通じ部品をお求めください。