

点滴棒取付セット TB-530-10


お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

取付方法


● ご使用の前に必ずお読みください。

製品を開封された際に、付属品に不足、不備等がないかご確認ください。

付属品	個数
点滴棒	1
専用点滴棒取付金具	2
専用ボルト	4

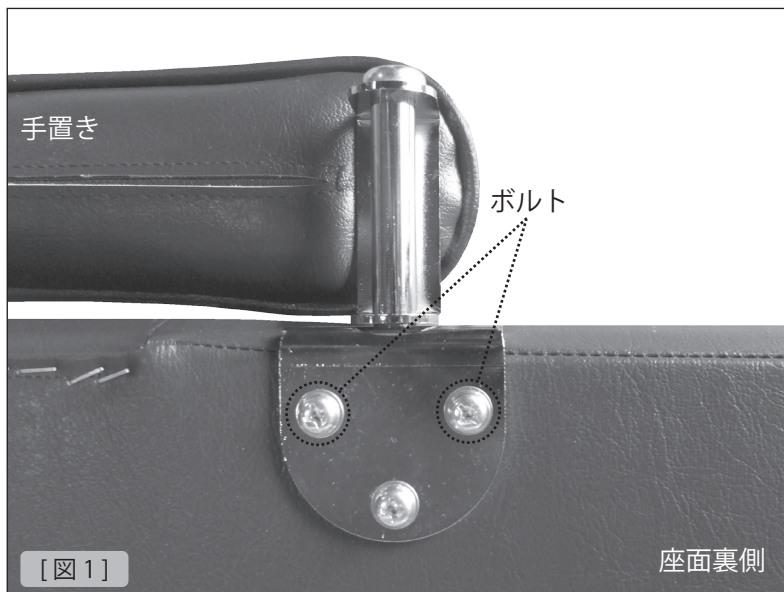

後付けする場合、ボルトをはずし[図2]のように取り付けてください。

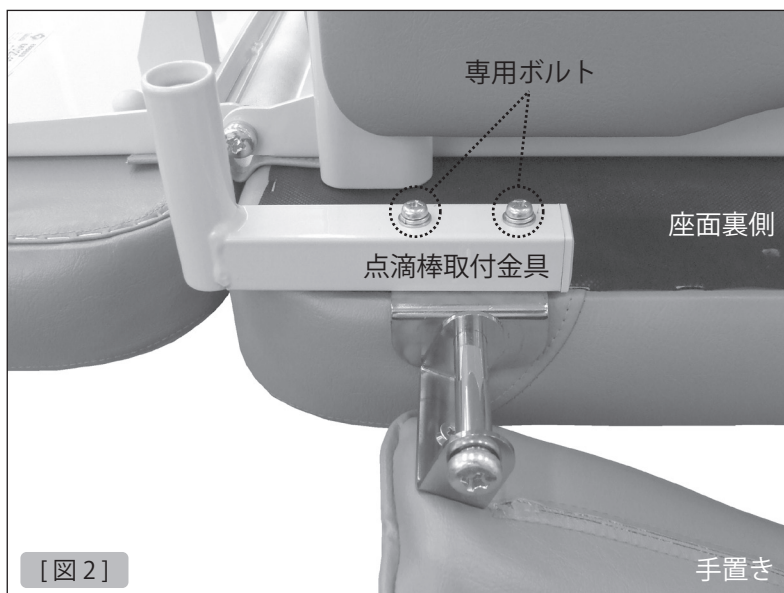

本図のように取り付けてください。

※ボルトはしっかり締め込んでください。手置きや金具がはずれて事故の原因となります。