

パラレル E X TB-534-03

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

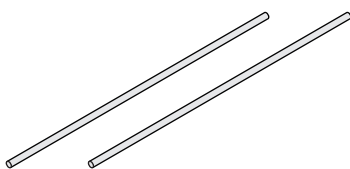
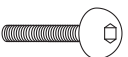
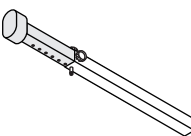
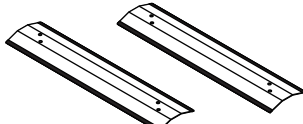
区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

</

注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	高さ調節時、指などを挟まないようにご注意ください。
	本製品は一人用です。複数人で同時に本製品をご使用にならないでください。転倒する恐れがあります。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂、ゴムエッジ等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。


部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

部 品 図	部 品 名	個 数	部 品 図	部 品 名	個 数
	手すり	2		六角ボルト	8
				M8 六角穴付きボルト	8
	支柱	左右各 2		M8 S ワッシャ	8
				六角レンチ・M8 用	1
	土台	2		スパナ	1

組立方法

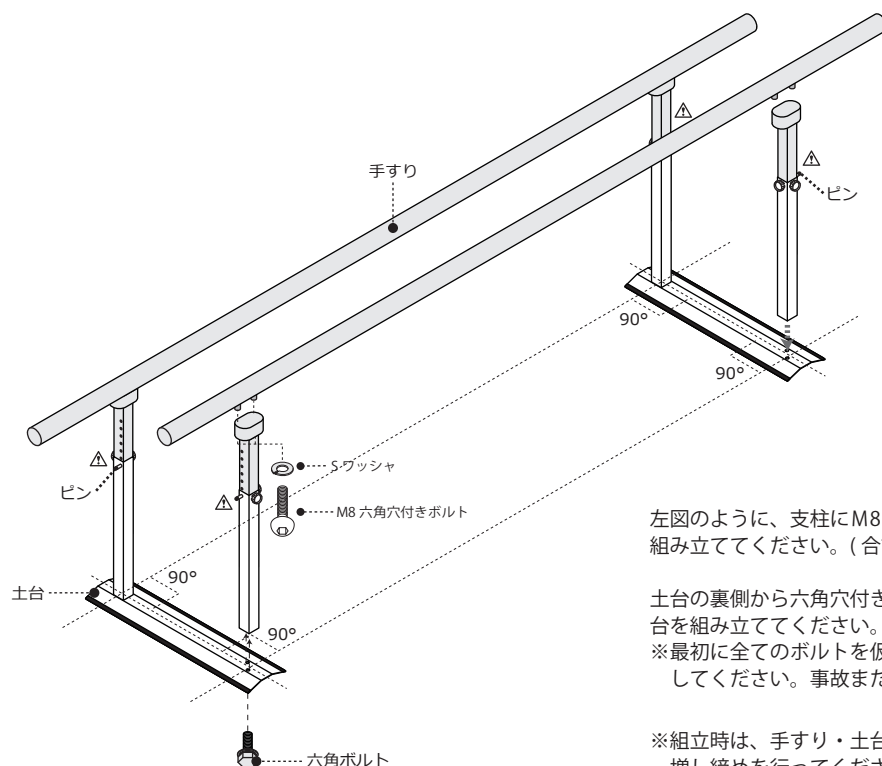● 組立時間：10 分 ※ お二人以上での組立をお薦めします。



△ 土台の向きに注意してください。
土台のピンが外側になるように
組み立ててください。

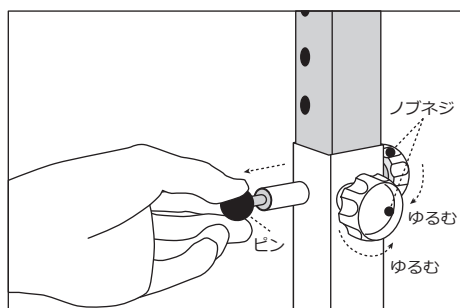
左図のように、支柱にM8 六角穴付きボルトを差し込み、手すりと支柱を
組み立ててください。(合計8箇所)

土台の裏側から六角穴付きボルトを差し込み、先に組み立てた手すりと土
台を組み立ててください。(合計4箇所)


※最初に全てのボルトを仮止めし、その後付属のレンチでしっかりと固定
してください。事故または、がたつきの原因となります。

※組立時は、手すり・土台が直角になっている事を確認した上でボルトの
増し締めを行ってください。

手すりの高さ調節方法



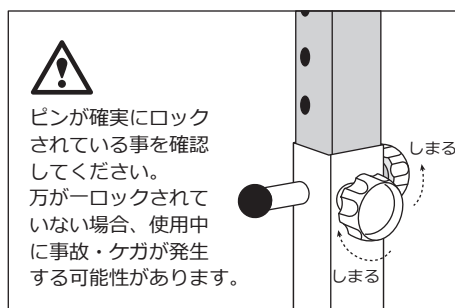2 カ所のノブネジをゆるめ、手すりの両端を二人で
持ちながら、ピンを引っ張り、ロックを解除して
ください。



支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さ
がロックされます。ご希望の高さに調整し、ノブネジ
をしめ固定してください。