

取扱説明書



垂直電動Sタイプ・垂直電動SCタイプ 垂直電動SFタイプ・垂直電動SLタイプ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
	ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。

注意	150kg以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆりみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	フットスイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。


株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

各部の名称および使用方法

● 使用方法と注意事項

△安全のため、十分に壁との間隔を確保して設置してください。

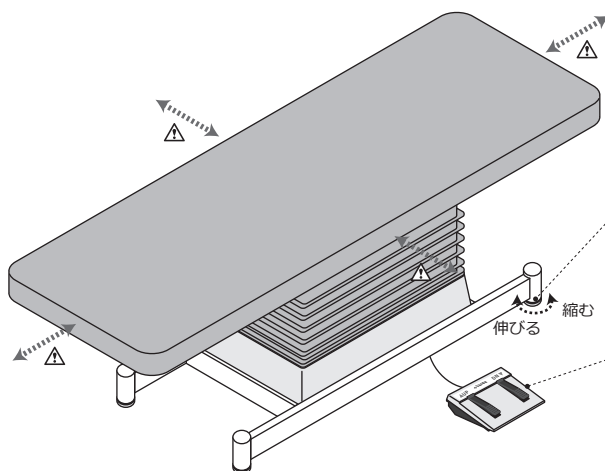

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力（6000N 負荷時）	MAX：144W
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒 下降：約 23 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチの長さ	2.5m
電源コードの長さ	3.2m

アジャスター

ベッドの設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

フットスイッチ（オートリターン機能付き）

【操作方法】


UP を踏んでいる間、シートが上昇します。離すと停止します。DN を踏むと最下限まで自動で下降します。下降中はどちらかのスイッチを踏むと停止します。

【リセット方法】

- ・フットスイッチを押しても「ピーピー」と音が鳴り昇降しなくなった時等にリセットしてください。
 - ・UP と DN を同時に 5 秒以上長押し、ピーピー音がなくなったら押すのをやめてください。その後、DN を押してベッドを最下部まで下げてください。
- ※タイミングよく同時に押さないと音が消えません。
※ベッドを最下部まで下げないとリセットは完了しません。

レベルキャスターの操作方法

● 垂直電動 S C タイプ

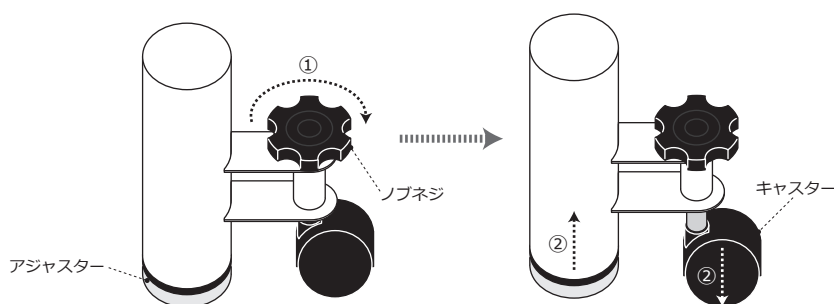

- ① 4 箇所のノブネジを時計回りに回します。
- ② キャスターが伸び、脚部が浮き上がりますので、ベッドが移動可能な状態になります。
- ③ ベッド移動後は、脚部アジャスターが床面にしっかりと設置するよう、ノブネジを反時計回りに回してください。脚部が床面に設置しているのを確認後、ベッドをご使用ください。

修理を依頼する前に

● 「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状	ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	入電源がない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？ 確実に差し込んでください。
	入電源がない	電源コードが断線していませんか？ 取扱店、または当社にご連絡ください。
	入電源がある	フットスイッチが断線していませんか？ フットスイッチの交換が必要です。
	入電源がある	連続して昇降操作をしていませんか？ 取扱店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある	アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。