


マルチクイック TB-1126

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

注意	テーブルの上に設置した際、胸部やフェイス部の角度によって不安定になり落下する恐れがあります。ご使用時には十分にご注意ください。
	胸部やフェイス部の角度調節後、しっかりとロックされている事を確認の上、ご使用ください。
	局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となります。ご注意ください。
	差込フェイスの耐荷重は約 15kg です。それ以上強い負荷をかけると破損する恐れがあります。ただし使用状況・使用期間によって、耐荷重は変わる場合があります。

使用方法

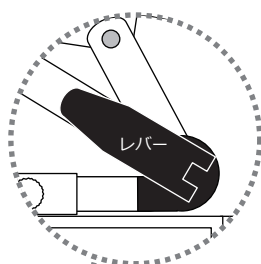


レバーを手前に引く事でロックが解除され、フェイス部の位置を無段階で調節できます。ベースを持ち上げることで約 6cm のリフトアップが可能です。ご希望の位置に調節後、レバーを元の位置に戻してロックしてください。

警告 ご使用前に必ず確実にロックされているかをご確認ください。
注意 施術中にロックが外れる可能性があります。ご使用中は十分にご注意ください。

注意 施術等をお受けのお客様が、無意識にレバーに触れフェイス部のロックを解除し、危険な事故につながる可能性があります。十分にご注意ください。

注意 レバーを倒した（ロックした）状態でレバーを回転させないでください。
 ロックが効かなくなる不具合が発生する恐れがあります。

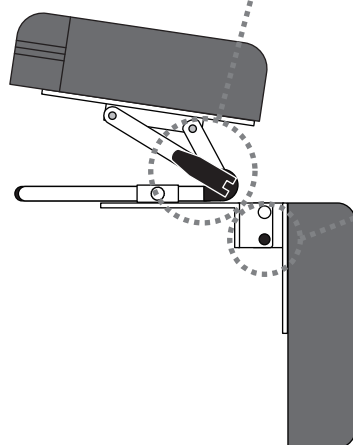

ピンを手前に引く事でロックが解除され、胸部の位置を三段階で調節できます。裏側の穴にピンが入ることで、角度がロックされます。

注意 ピンが確実にロックされている事を確認してください。
警告 万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。