

SNスミス TB-1488 STスミス TB-1489

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置するには、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。


注意	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご注意ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。

部品一覧表


● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

部 品 名	個 数	部 品 図	部 品 名	個 数
座シート	1		ネジ(大) (STスミス)	4
			ネジ(小)	16
背もたれシート (STスミス)	1		平ワッシャー(大) (STスミス)	4
			平ワッシャー(小) (STスミス)	4
脚部	4		スプリングワッシャー (STスミス)	4

- ①下図のように座シートを裏返し、
脚部をネジ穴に合わせてください。

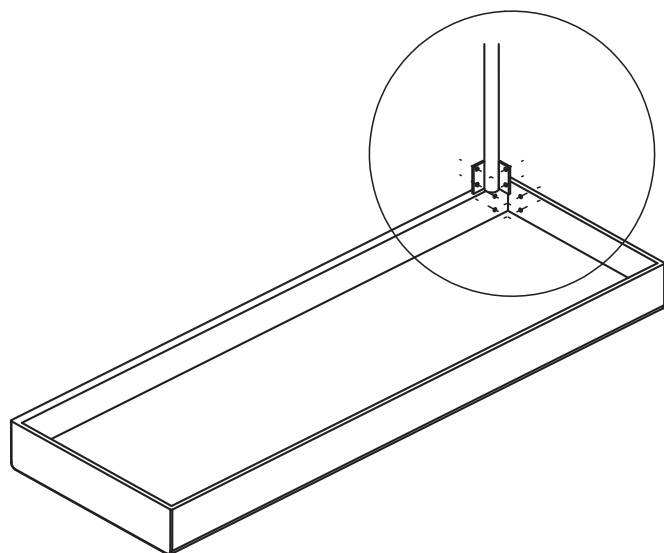



- ②ネジ (小) をプラスドライバーで締めて
取り付けてください。(16カ所)

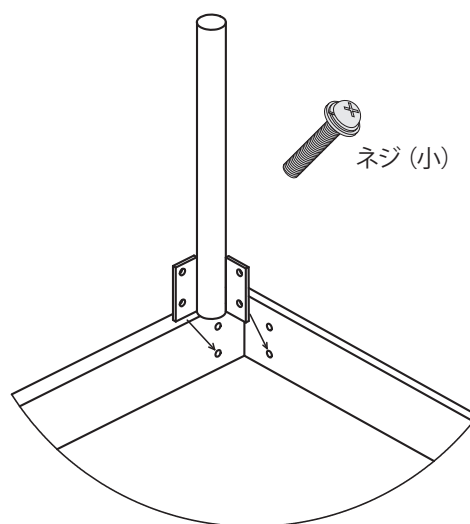


STスミス TB-1489

- ③座シートを横に倒し、背もたれシートをネジ穴に合わせてください。
ネジ (大) にスプリングワッシャー・平ワッシャー (小) ・平ワッシャー (大) の順に通し、4カ所のネジを手で仮止めし
その後、プラスドライバーで締めて取り付けてください。(4カ所)

※テーブルやベッドの上に置いていただくと、ネジ穴を合わせやすくなり組み立てやすくなります。

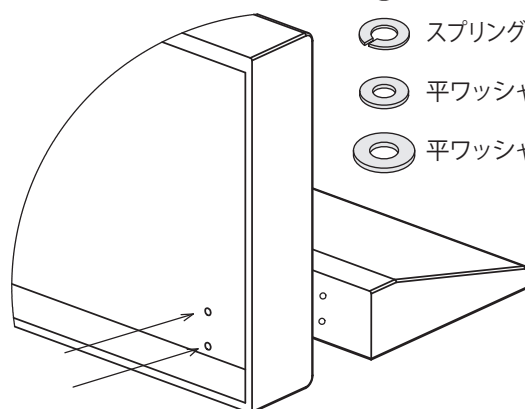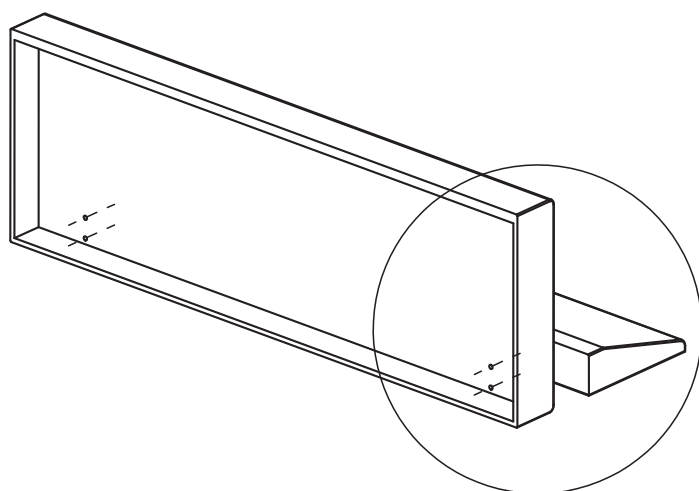

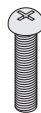-  ネジ (大)
-  スプリングワッシャー
-  平ワッシャー (小)
-  平ワッシャー (大)