

取扱説明書



電動昇降台シリーズ（リモスモーター仕様）

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
	ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。

注意	150kg 以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆりみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	フットスイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
	キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。


組立方法

座シートを裏返した状態で、下図のように脚部を取り付けてください。
※ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。

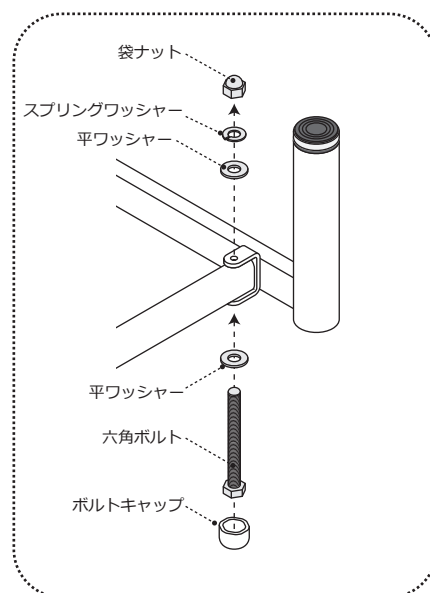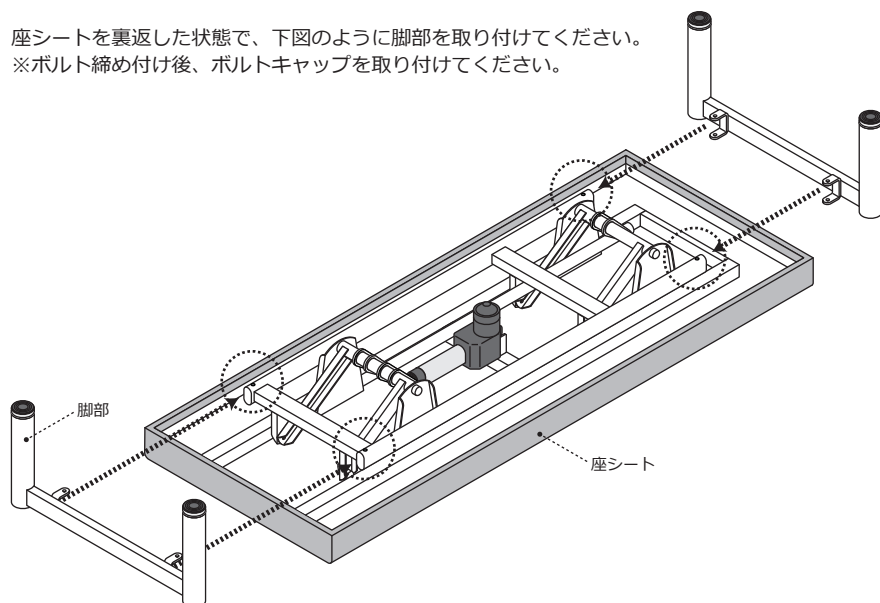

設置方法

● 使用方法と注意事項

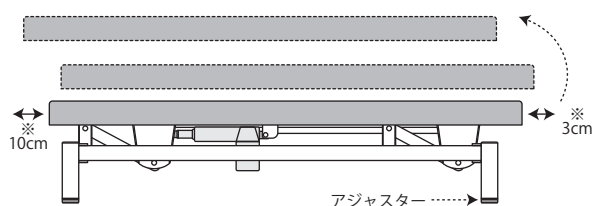

- 本製品は垂直に昇降しません。前後に円弧を描きながら昇降しますので、左記可動図の作動範囲（※印）以上を壁、または人から離して設置してください。
- ベッドの設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

モーターの仕様

● 中国製モーター

電 源	入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC29V
消費電力（6000N 負荷時）	MAX：約 120W / 1A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒 下降：約 25 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	3m
電源コードの長さ	4m


※1 モーターの製品

電 源	入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC29V
消費電力（6000N 負荷時）	MAX：約 240W / 1A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒 下降：約 25 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	3m
電源コードの長さ	4m

※2 モーターの製品


各部の名称及び使用方法

● アプローチ系製品

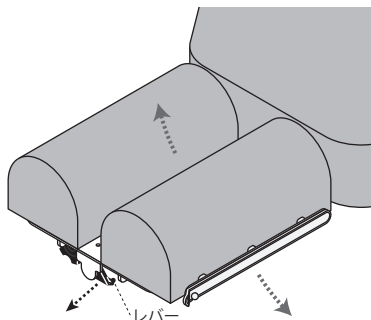


【ヘッド部の角度調節方法】

レバーを手前に引くことで、ヘッド部の角度調整をすることができます。ご希望の角度でレバーを離すと、固定できます。

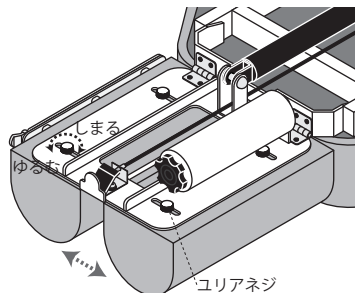

【縦型ヘッドの調節方法】


ユリアネジをゆるめる事で、ヘッドの幅を微調整できます。ご希望の位置でユリアネジをしめ、ヘッドを固定してください。

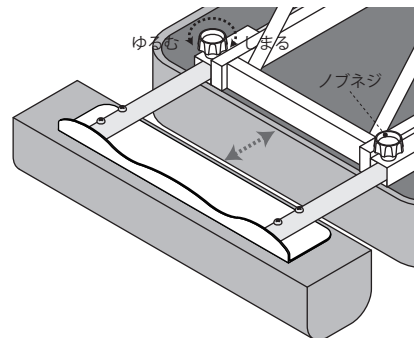


【マルチ部の操作方法】

ノブネジをゆるめる事で、マルチ部を伸縮することができます。ご希望の位置でノブネジをしめ、マルチ部を固定してください。


■ ロールペーパーの使用法（縦型ヘッド製品）

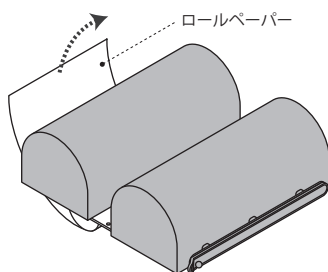


①ロールペーパーを引き出します。

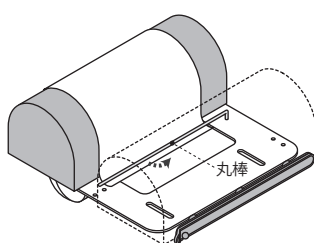

②上図のようにロールペーパーを丸棒の下側に通します。

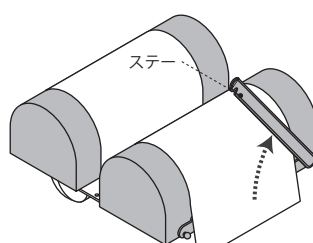


③ステーを持ち上げます。

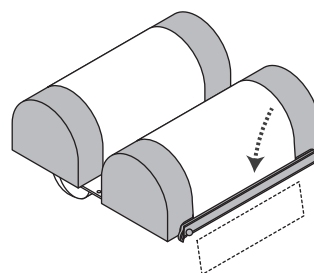

④ロールペーパーを挟んでステーを戻してください。はみ出たロールペーパーを切り取ってください。

ベッドガードの取付方法と使用方法


● ベッドガード付き製品

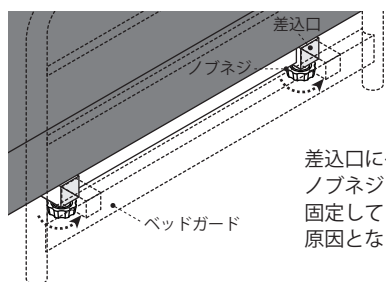


差込口にベッドガードを差し込み、ノブネジ（2カ所）をしめ、しっかり固定してください。ガタつきや脱落の原因となります。

- △ベッドガードにもたれたり、腰掛けたりしないでください。ベッドガードの破損や転倒する恐れがあります。
- △ベッドガードを調節する際、指などを挟まないようにご注意ください。

- △F型ベッドガードを逆に差した状態（下図参照）のままベッドを最低高に下げると、F型ベッドガードが床にあたり、ベッドの破損および床が傷つく恐れがあります。ベッドを最低高にする場合は、「ベッドガードを外す」もしくは「ベッドガードを上向きに差す」ようにしてください。

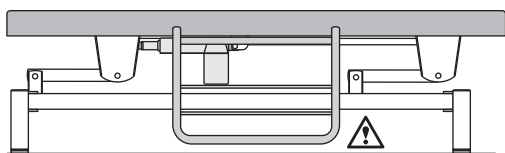

S型ベッドガード

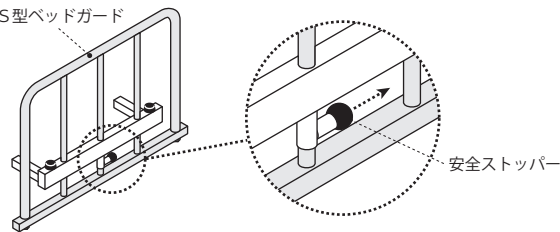


S型ベッドガードの操作方法

■ベッドガードを上げる場合

- 左手でベッドガードをつかみ、右手で安全ストッパーを引っ張ってください。ロックが解除されますので、そのまま左手で持ち上げてください。ベッドガードが再度ロックされたら左手を離してください。
- △ピンが調節穴に入りロックされていることを、必ず確認してください。

■ベッドガードを下げる場合

- 左手でベッドガードをつかみ、右手で安全ストッパーを引っ張ってください。ロックが解除されますので、そのまま左手で引き下げてください。ベッドガードが再度ロックされたら左手を離してください。

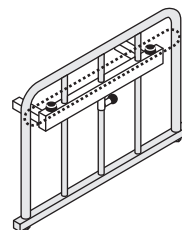

- △ベッドガードを下げる際、○の部分に手を絶対に置かないでください。手を挟む危険性があります。

各部の名称及び使用方法

●ホットシリーズ系製品

①座シート裏側のコントローラー差込口に、コントローラーのプラグを差し込みます。

②コントローラーの電源プラグをコンセントに差し込みます。

③コントローラーを「強」に合わせます。



※使用する30分～1時間前に通電します。予熱をするときは毛布などでマット全体を覆うことにより保温効果があります。

④温度調節を下げて快適な温度でご使用ください。

※快適に使用される温度は、体質など個人差で異なります。

⑤使用後は電源スイッチを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントを抜いてください。

※本製品はタイマー機能が付いておりません。必ず電源スイッチを「切」にしてください。

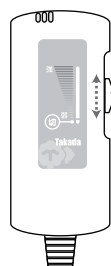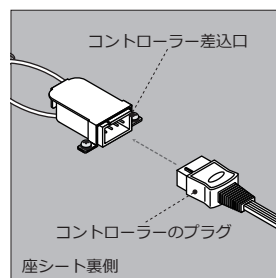

スライドボリュームコントローラー

調節スイッチを動かす事で、電源の「切」・「入」、温度調節の「弱」～「強」を設定する事が可能です。使用開始時は「強」の位置に合わせてしばらく通電し、その後快適な温度設定を行ってください。

温熱機能について

本製品は、電源を入れた状態でコントローラーの目盛を「強」にしてもマット表面は放熱され、ほとんど暖かさを感じませんが、上掛けタオルや毛布を掛けることで保温性が高まり暖かくなります。長時間ご使用しますと、身体の接触部分が熱くなり低温やけどをおこす可能性があります。ご使用前に快適な温度まで目盛を調整してください。

「強」の目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。

⚠ 座シート上面にピンや針を刺したりしないでください。感電や発火の原因となります。

座シート上面でアイロンを使用したり、重いものをのせないでください。

自分自身で温度調節できない方や、皮膚に疾患のある方が使用する場合はご注意ください。低温やけどの恐れがあります。


フットスイッチの操作方法

▲上昇 ▼下降

踏んでいる間作動し、離すと停止します。



※スイッチの中央を真上から踏んでください。

斜めに踏むと作動しない場合があります。

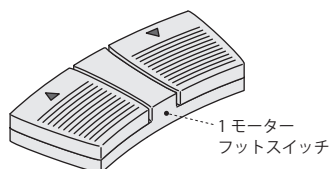


【使用上のご注意】

ベッド内部に手足を挟まれる危険性があります。高さを操作中には、周辺に挟まれる危険性のある物、または患者さんなどの人が近づかないよう十分ご注意ください。

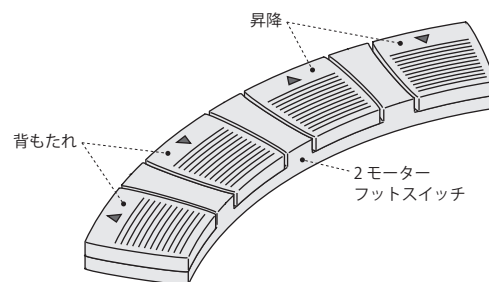
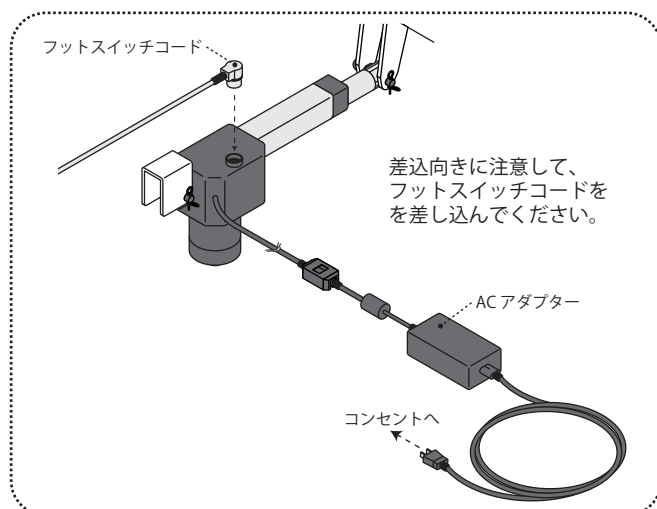


差込向きに注意して、フットスイッチコードを差し込んでください。

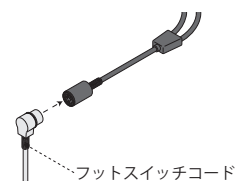

トータルロックキャスターの操作方法


●カイザー系製品

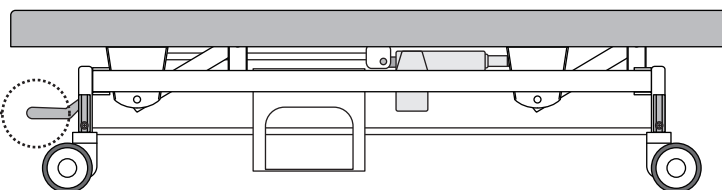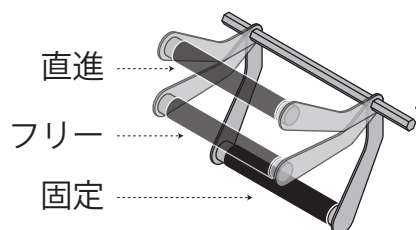

⚠ 手足を挟む危険がございます。レバー以外の所に触れないでください。

定期メンテナンスのお願い

●快適にお使いいただくために

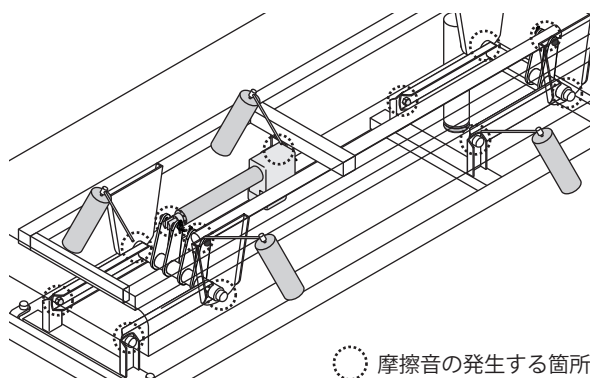

○ 摩擦音の発生する箇所

●市販の潤滑スプレー又はグリーススプレーで、3ヶ月を目安に左記の可動部分に適量を吹き付けてください。
吹き付けを怠ると、がたつきや摩擦音の原因となります。

※回転部分またはボルト部分に市販の潤滑スプレーを吹き付けてください。
※吹き付けた際に潤滑油の飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等をあててご使用ください。
※市販の潤滑スプレーは、記載の使用方法をよく読んでから取り扱ってください。
※万一摩擦音が発生した場合、吹き付けにより軽減しますが浸透するまでに2～3日かかります。軽減されない場合は、ご購入代理店にお申し付けください。

修理を依頼する前に

●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状		ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	電源が入らない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
		電源コードが断線していませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
	電源が入っている	フットスイッチが断線していませんか？	フットスイッチの交換が必要です。
		連続して昇降操作をしていませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある		アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382