

電動昇降採血台・電動昇降Nテーブル

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。





	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	本製品の作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因となります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
	本製品を移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因となります。

	100kg 以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因となります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆرم、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	電源コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	手元スイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	電源コードの上に物を置かないでください。コードが傷ついて、断線・ショートによる感電や発火の原因となります。

アジャスター、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

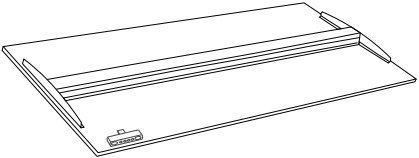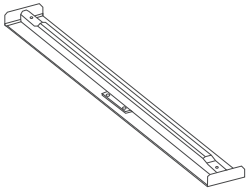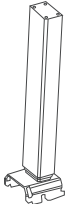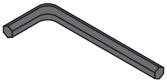
テーブル		脚部	支柱	六角レンチ
				
1		2	2	1
アジャスター	六角穴付きボルト			
				
4	8			

各部の名称と使用方法




組み立て方法


テーブルを裏向きに置き、支柱を取り付けてください。

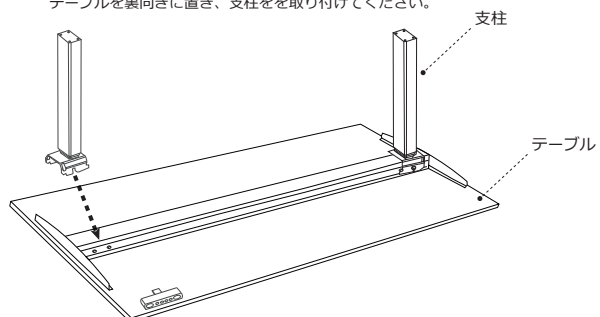


支柱を取り付けた後、脚部、アジャスターを取り付けてください。

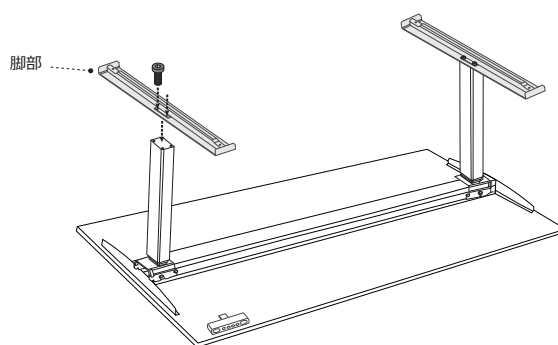


カチッと音が鳴るまで
差し込んでください

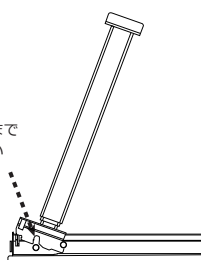

アジャスター

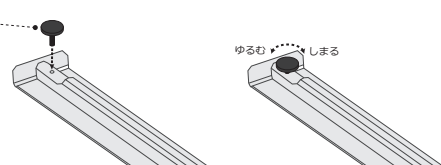

手元スイッチの操作方法

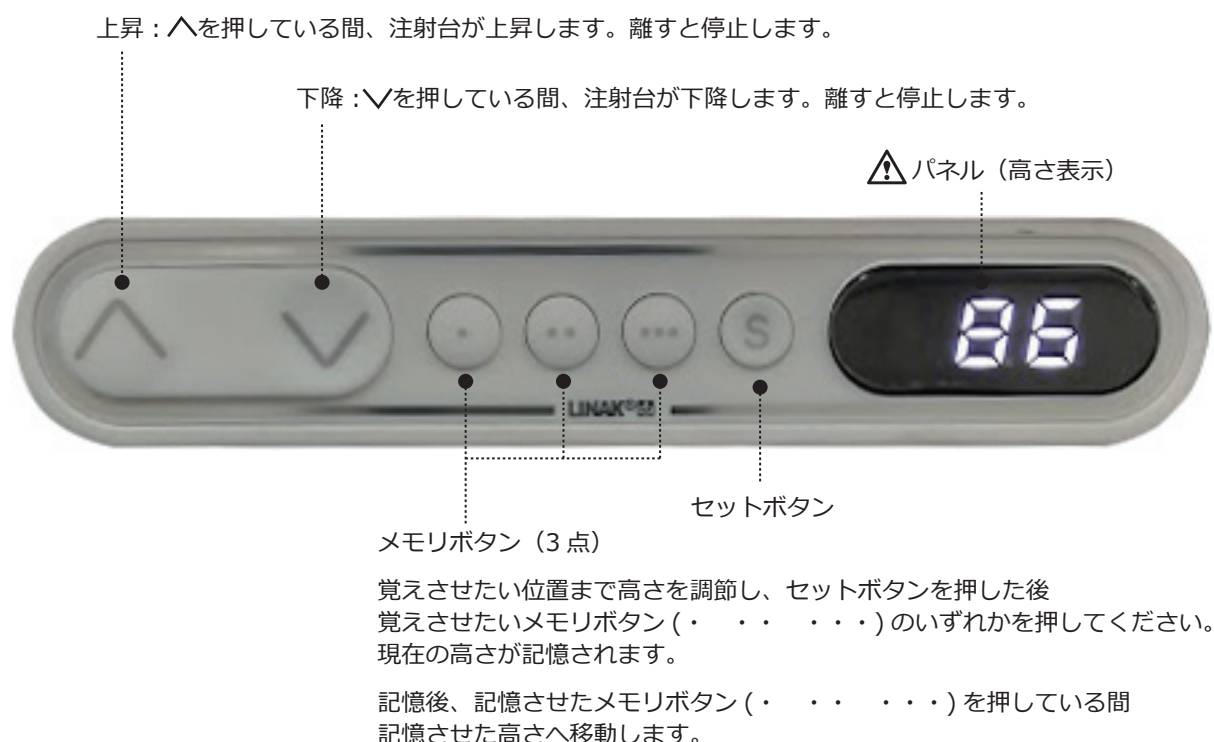

⚠ 製品組み立て後、現在の高さを一度設定していただく必要があります。
設定完了後、パネル（高さ表示）に正確な高さが表示されます。

設定方法

高さを一番下まで下降してください。

△と▽を同時に長押しするとパネルに――と表示され、その後数字が表示されます。

△又は▽を押し、61に合わせてセットボタンを押してください。

モーターの仕様

電 源	入力：AC100～230V 50/60Hz
消費電力	MAX：約 350W / 1A
昇降速度（無負荷時）	上昇：約 18 秒 下降：約 17 秒
最大耐荷重	100kg
電源コードの長さ	3m

エラーコード一覧

●エラー時パネルに表示されます

エラーコード	内容	想定される原因	対処方法
E 01	位置不明のため初期化が必要です。	●位置のエラー。 ●昇降ユニットを新しく交換した。	●初期化を行ってください。 (高さを一番下まで下げると初期化されます)。 初期化実行中もこのコードが表示されます。
E 02	上昇方向に過負荷を検出。		●負荷を取り除き、再度操作してください。
E 03	下降方向に過負荷を検出。		●負荷を取り除き、再度操作してください。
E 08	予期しないリセットが発生しました。		●初期化を行ってください。 ●電源ケーブルを 10 秒抜いてみてください。 ●コントロールボックスを交換してください。
E 10	電源電圧低下 (10% 以上) を検出、もしくは停電等による電源の瞬断を検出しました。	●稼働中に電源コードが抜かれた。 ●内部故障。	●電源コードが確実に接続されているか確認してください。 ●電源プラグを抜き 10 秒経過した後、再度電源プラグを差し込んだ後に初期化を行ってください。 ●電源ケーブルまたはコントロールボックスを交換してください。
E 12	下限または上限オーバーが発生しました。		●初期化を行ってください。
E 13	動作中に回路のショートを検出しました。	●モーターケーブルが圧迫されている。 ●モーターの短絡。	●モーターケーブルがきちんと接続されているか確認してください。 ●モーターケーブルを取り外して交換してください。 ●ご購入された販売店にお問い合わせください。
E 14	位置検知不能です。		●初期化を行ってください。作動しない場合はご購入された販売店にお問い合わせください。
E 15	電力が使用限度に達しました。	●内部故障。	●コンセントがタコ足配線になっていないか確認してください。 ●ご購入された販売店にお問い合わせください。
E 16	不適切なキー操作です。	●複数ボタンを同時に押した。	●昇降スイッチのボタンが押されたままになっていないかを確認してください。 ●初期化を行ってください。作動しない場合はご購入された販売店にお問い合わせください。
E 17	安全装置により上方向には動作できません。		●初期化を行ってください。
E 23	チャンネル 1 の昇降ユニットを検出できません。	●チャンネル 1 が切断された。	●モーターケーブルの挟み込みが無いか確認してください。 ●昇降ユニットが確実に接続されていることを確認の上初期化を行ってください。 ●モーターケーブルまたは 昇降ユニット (支柱) を交換してください。
E 29	初期化後にチャンネル 1 の昇降ユニットが交換されたか異常を検出しました。		●モーターケーブルが確実に接続されていることを確認し初期化を行ってください。作動しない場合はご購入された販売店にお問い合わせください
E 35	チャンネル 1 にパルスの異常を検出しました。	●高さ検出用センサー素子の誤作動または故障。	●モーターケーブルが確実に接続されていることを確認し初期化を行ってください。作動しない場合はご購入された販売店にお問い合わせください
E 71	回路のショートを検出しました。		●ご購入された販売店にお問い合わせください。
E 72			
E 90	製品の温度が高くなりました。操作は出来ません。		●製品の温度が下がるまで操作はしないでください。 電源コードを挿した状態で 2 時間放置してください。
E 92	電圧が高すぎます。		●正しい電圧 (100V) が確認してください。
E 93	DS1 (オプションの挟み込み防止センサー。コントロールボックスに差し込んで使用。) が作動しました。		●昇降時の妨げになるものが無いか確認してください。 あれば取り除いてください。
E 94	DS1 (オプションの挟み込み防止センサー。コントロールボックスに差し込んで使用。) が検知されません。		●DS1 が製品から取り外され、正しく接続されていません。