

# 取扱説明書



## パラレルEX TB-534-03

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。





区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	滑りやすい床面や濡れている床面では本製品が動く恐れがあります。
	本製品を火気に近づけないでください。
	湿気が多い所や、雨・風の当たる所に本製品を放置しないでください。
	本製品は歩行訓練以外の目的で使用しないでください。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	手すりにもたれたり、片方だけに強い負荷をかけないでください。転倒する恐れがあります。
本製品をご使用になる場合、お一人で使わないでください。必ず付添人の元でご使用ください。	

<b>注意</b>	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	高さ調節時、指などを挟まないようにご注意ください。
	本製品は一人用です。複数人で同時に本製品をご使用にならないでください。転倒する恐れがあります。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂、ゴムエッジ等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。

### 部品一覧表


● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

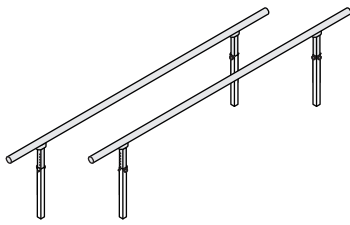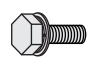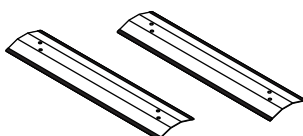部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	手すり	2		六角ボルト	8
	土台	2		スパナ	1

## 組立方法

● 組立時間：10分 ※ お二人以上での組立をお薦めします。

下図のように、土台の裏側から六角ボルトを差し込み、手すりと土台を組み立ててください。(合計8箇所)  
※最初に全てのボルトを**仮止め**し、その後付属のスパナでしっかりと固定してください。事故または、がたつきの原因となります。

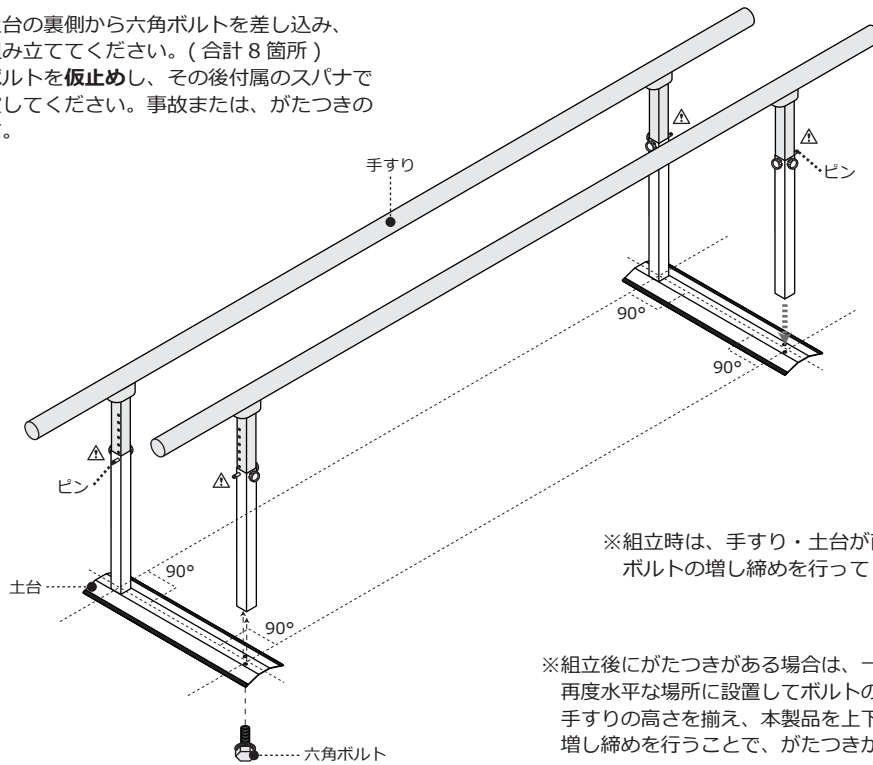


△土台の向きに注意してください。土台のピンが外側になるように組み立ててください。


※組立時は、手すり・土台が直角になっている事を確認した上でボルトの増し締めを行ってください。

※組立後にがたつきがある場合は、一旦ボルトを緩めていただき、再度水平な場所に設置してボルトの増し締めを行ってください。手すりの高さを揃え、本製品を上下逆の状態(手すり側を床面)にして増し締めを行うことで、がたつきが解消される場合があります。

## 手すりの高さ調節方法

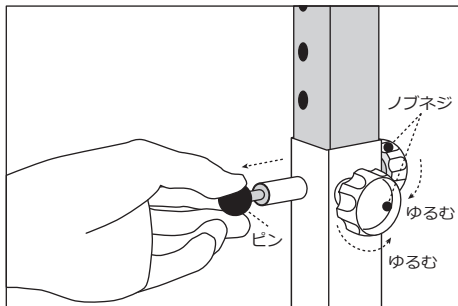

2カ所のノブネジをゆるめ、手すりの両端を二人で持ちながら、ピンを引っ張り、ロックを解除してください。

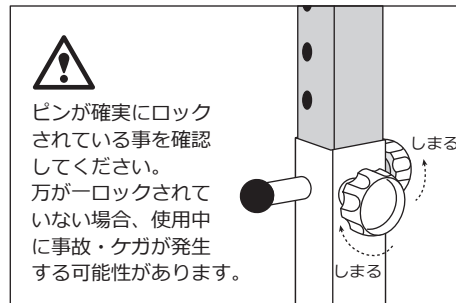

支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。ご希望の高さに調整し、ノブネジをしめ固定してください。