





垂直電動Eタイプシリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

 警告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。	

 注意	150kg以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	フットスイッチは踏み間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。	
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。	


各部の名称および使用方法

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (6000N 負荷時)	MAX : 132W / 5.5A
昇降速度 (100kg 荷重時)	上昇 : 約 22 秒 下降 : 約 16 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチの長さ	2.5m
電源コードの長さ	3.2m

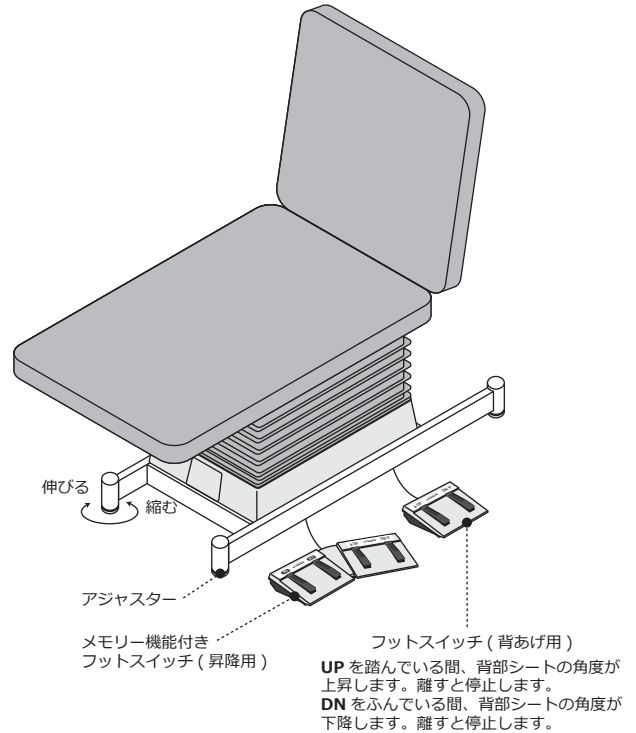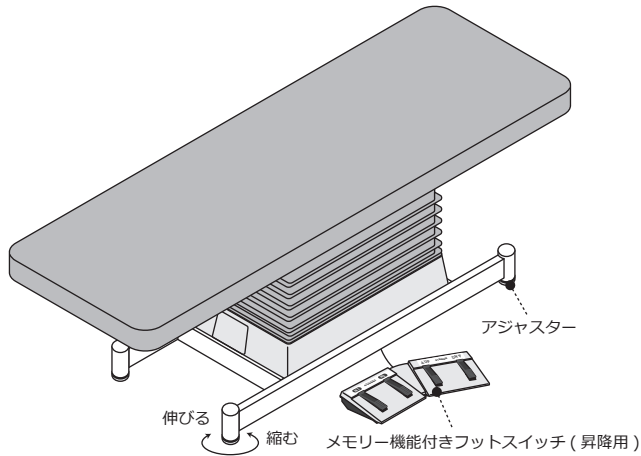


ベッドガードの取付方法と使用方法

● ベッドガード付き製品

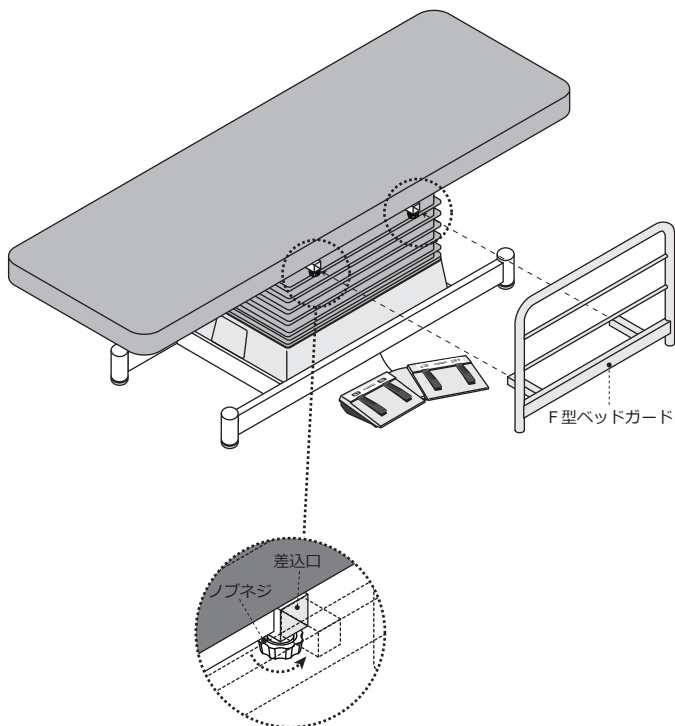

差込口にベッドガードを差し込み、ノブネジ (2カ所) を締め、しっかり固定してください。ガタつきや脱落の原因となります。

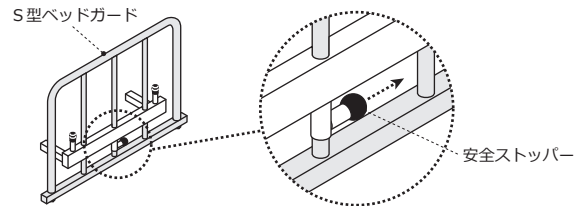


S型ベッドガードの操作方法


■ ベッドガードを上げる場合

左手でベッドガードをつかみ、右手で安全ストッパーを引っ張ってください。ロックが解除されますので、そのまま左手で持ち上げてください。ベッドガードが再度ロックされたら左手を離してください。
△ピンが調節穴に入りロックされていることを、必ず確認してください。

■ ベッドガードを下げる場合

左手でベッドガードをつかみ、右手で安全ストッパーを引っ張ってください。ロックが解除されますので、そのまま左手で引き下げてください。ベッドガードが再度ロックされたら左手を離してください。

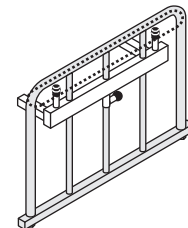


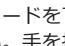△ベッドガードを下げる際、の部分に手を絶対に置かないでください。手を挟む危険性があります。


設置方法

●使用方法と注意事項

△安全のため、十分に壁との間隔を確保して設置してください。

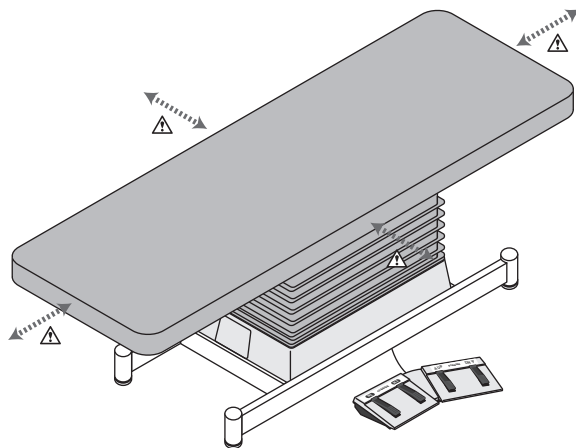

ポジションメモリー機能の説明及び設定方法

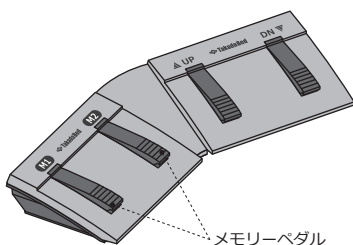

診察しながら簡単に操作できるメモリー機能付きフットスイッチです。ポジションメモリー機能で、使用頻度の多い高さを2つまで記憶させることができます。通常は、患者さんの乗り降りが容易に行える最低高と使用頻度の多い高さのメモリー記憶を推奨します。

【操作方法】

UPを踏んでいる間、シートが上昇します。離すと停止します。
DNを踏んでいる間、シートが下降します。離すと停止します。

【ポジションメモリーの設定方法】

ご希望の高さの状態ですべてのメモリーペダル（M1・M2）のいずれか一つを5秒間踏むと、「ピー」と音が鳴り、高さが記憶されます。設定後、M1・M2を踏むだけで設定した高さまで自動的に移動します。ベッド昇降中はいずれのスイッチを踏んでも停止いたします。

【使用上のご注意】

ベッド内部に手足を挟まれる危険性があります。高さを操作中には、周辺に挟まれる危険性のある物、または患者さんなどの人が近づかないよう十分ご注意ください。さらに、メモリーペダルをご使用中には、記憶させた高さまでの移行が完全に終了するまでは、本製品から離れないようお願いいたします。

【リセット方法】



異常停止し、昇降しなくなった時等にリセットしてください。フットスイッチのM2とUPを同時に5秒程度長押しすると、「ピーピー」と連続して音が鳴ります。鳴り終わりましたら、DNを押してベッドを最下部まで下げてください。

※タイミング良く同時に押さないと音が鳴りません。

※ベッドを最下部まで下げないとリセットは完了しません。

トータルロックキャスターの操作方法


●トータルロックキャスター付き製品

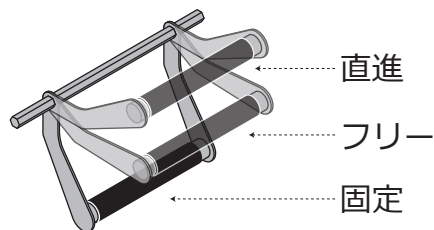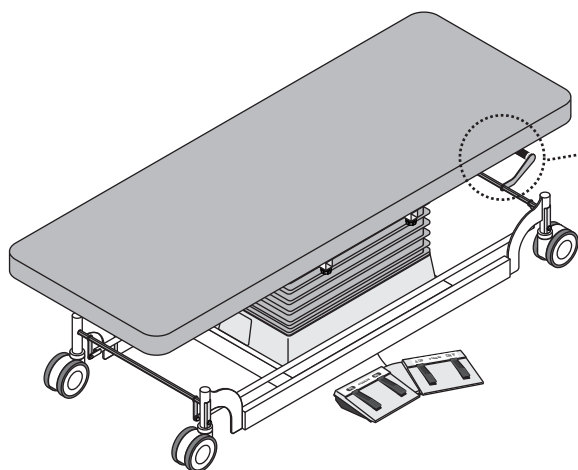

△手足を挟む危険がございます。レバー以外の所に触れないでください。

レベルキャスターの操作方法

● レベルキャスター付き製品

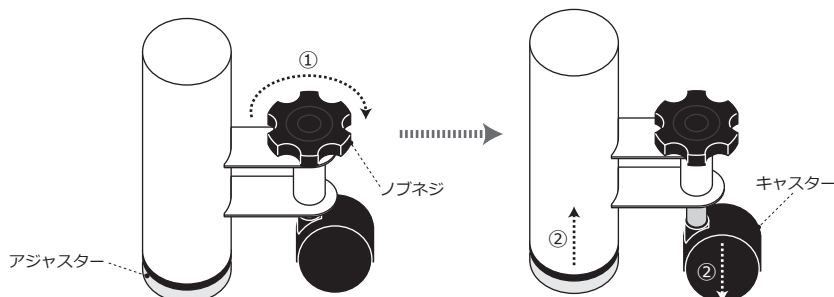


- ① 筒所のノブネジを時計回りに回します。
- ② キャスターが伸び、脚部が浮き上がりますので、ベッドが移動可能な状態になります。
- ③ ベッド移動後は、脚部アジャスターが床面にしっかりと設置するよう、ノブネジを反時計回りに回してください。脚部が床面に設置しているのを確認後、ベッドをご使用ください。

ステップレバーの操作方法

● ステップレバー付き製品


ベッド移動時

レバー（大）を手で押さえて、ロックしてください。

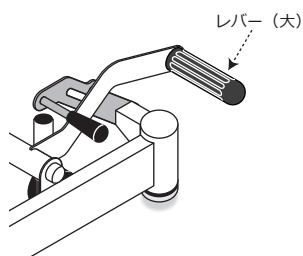

ベッド固定時

レバー（大）を手で押さえながら、レバー（小）を手で引き上げてロックを解除してください。

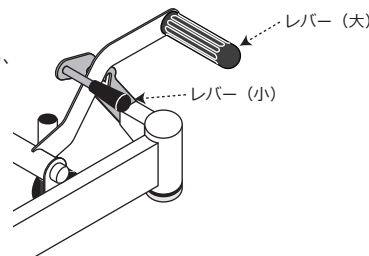

△ 操作上のご注意

- 操作時には、絶対にレバー（グリップ）以外の所は触れないでください。手や足を挟む危険があります。
- ベッドに人が乗った状態でのご使用はしないでください。
- ベッドを設置される際は必ずキャスターを解除し、アジャスターにて固定してください。
- 移動時には、アダプター及びフットスイッチコードが外されているかを必ずご確認ください。

修理を依頼する前に

● 「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状		ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	入電源がない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
		電源コードが断線していませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
	入電源がある	フットスイッチが断線していませんか？	フットスイッチの交換が必要です。
		連続して昇降操作をしていませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある	アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。	

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
 TEL. 072-484-8800 (代)
 URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
 お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382