

# 取扱説明書



## 電動エステー TB-835

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因となります。
本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。	


<b>注意</b>	150kg以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードの上に物を置かないでください。コードがきずついで、断線、ショートによる感電や発火の原因となります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	角度調節を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	手元スイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。また、設置場所等には十分ご注意ください。また、設置場所等には十分ご注意ください。	

## 各部の名称および使用方法


●ご使用の前に必ずお読みください。

### 背部連動式電動調節機能

手元スイッチ操作で、背部・脚部連動で角度調節することができます。

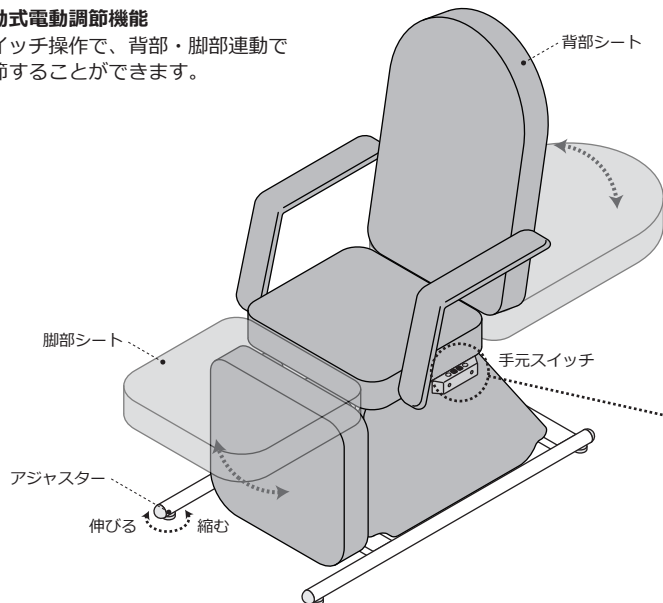

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (6000N 負荷時)	MAX : 100W / 1A
昇降速度 (100kg 荷重時)	リクライニング : 約 18 秒
最大耐荷重	150kg
電源コードの長さ	2.4m

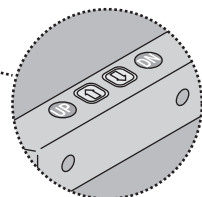


↑ を押している間、背部シートが上昇 (脚部シートは下降) します。離すと停止します。

↓ を押している間、背部シートが下降 (脚部シートは上昇) します。離すと停止します。


## アームレストの取付方法

※プラスドライバーが必要になります。

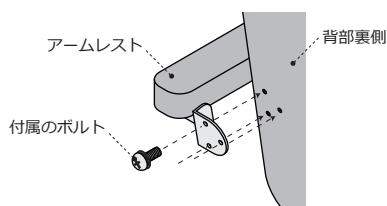


付属のボルトで、背部・座部裏側にアームレストをしっかりと取り付けてください。  
※背部を少し上げた状態にすると取付やすくなります。  
※ボルトはしっかりと締め込んでください。アームレストがはずれて事故の原因となります。

⚠ L型の取付金具は、必ず下図の【正しい取付方向】のように取り付けてください。

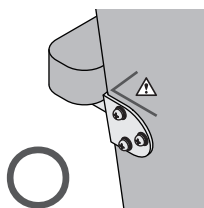


正しい取付方法

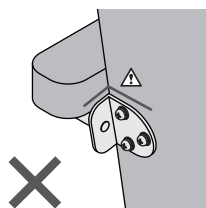

誤った取付方法

⚠ アームレストは必ず下図のように、折れ曲がる箇所から長い方を背部、短い方を座部に取り付けてください。  
※反対側に取り付けると、事故の原因となります。

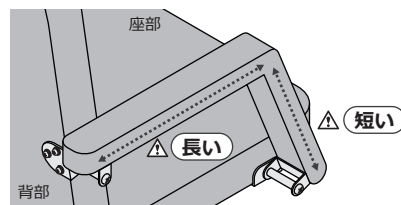

## 修理を依頼する前に

●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状	ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	入電源がない 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
	入電源がない 電源コードが断線していませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
入電源がある ベッドが動かない	連続して昇降操作をしていませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある	アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。