

トレンディングベッド TB-1065

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



| 区分 | 危険や損害の大きさと切迫の度合い |
|-----------|--|
| 警告 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 注意 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。 |

| | |
|-----------|--|
| 警告 | 本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。 |
| | 改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。 |


| | |
|--|--|
| 注意 | ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご注意ください。故障や破損の恐れがあります。 |
| | ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。 |
| | ベッドの角度・高さ調節時に指を挟まないよう十分注意してください。 |
| | 局部的に強い荷重をかけないでください。破損や転倒事故の原因となります。 |
| アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。 | |

天板の角度・高さ調節方法

頭側・足側のレバーを引き上げる事で、天板の角度・高さ調節をすることができます。

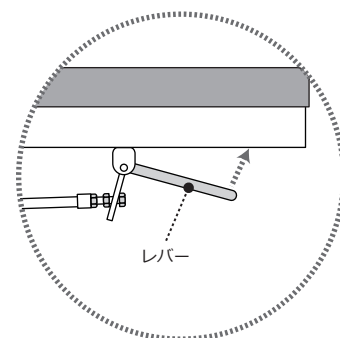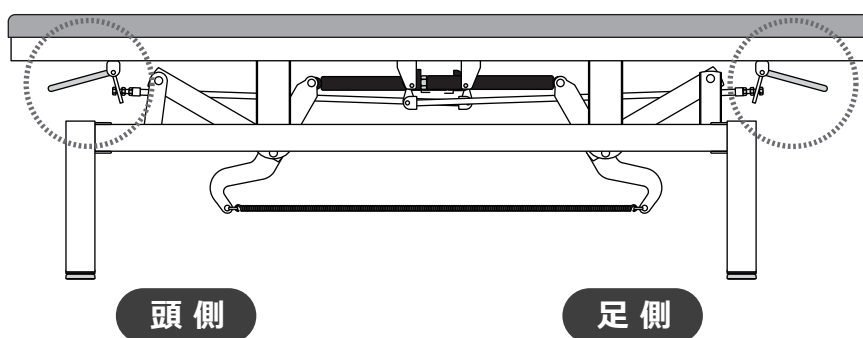


天板の角度・高さ調節方法

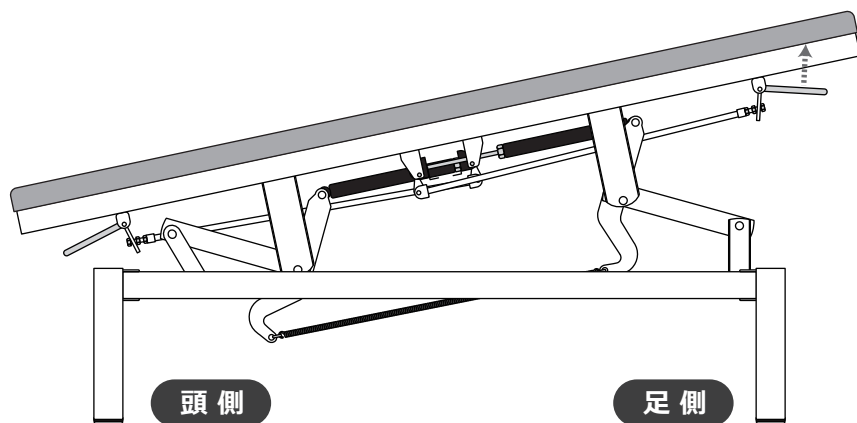

■トレンデレンバーグ 角度：0～12°

足側のレバーを引き上げ、天板をご希望の角度に調節してください。


天板を下げる場合は、レバーを引き上げながら天板を押さえ、ご希望の角度に調整してください。

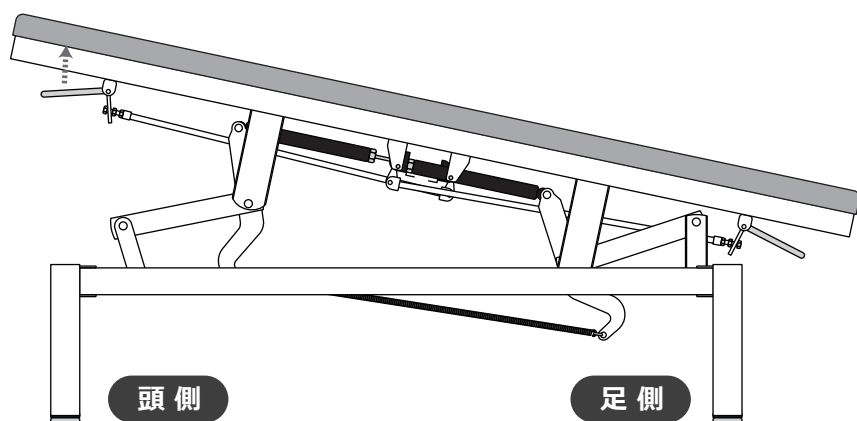

■リバーストレンデレンバーグ 角度：0～12°

頭側のレバーを引き上げ、天板をご希望の角度に調節してください。

天板を下げる場合は、レバーを引き上げながら天板を押さえ、ご希望の角度に調整してください。

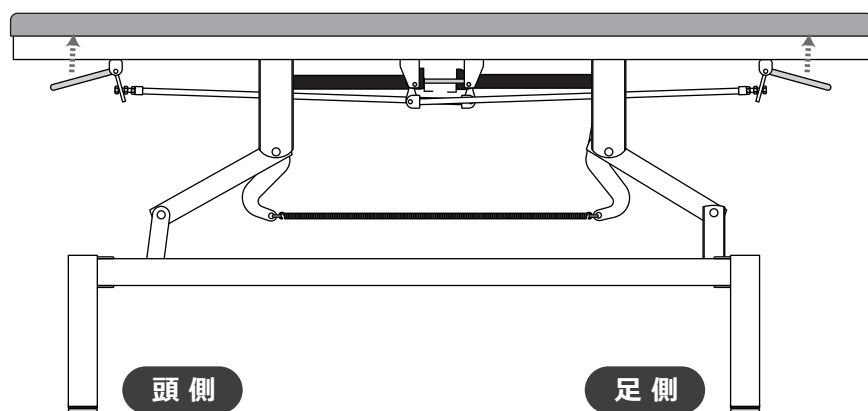

■高さ調節：調節範囲26cm

頭側・足側のレバーを引き上げ、天板をご希望の高さに調節してください。

天板を下げる場合は、レバーを引き上げながら天板を押さえ、ご希望の高さに調整してください。