


セラピスティック TB-890


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

組立方法

① カーテンにセラピスティックを通します。

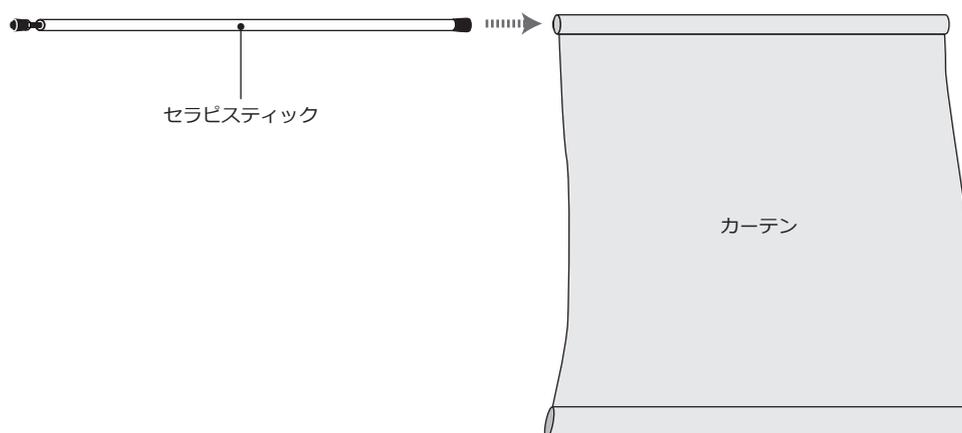

② 黒ゴムを回す事でセラピスティックの長さを調節できます。

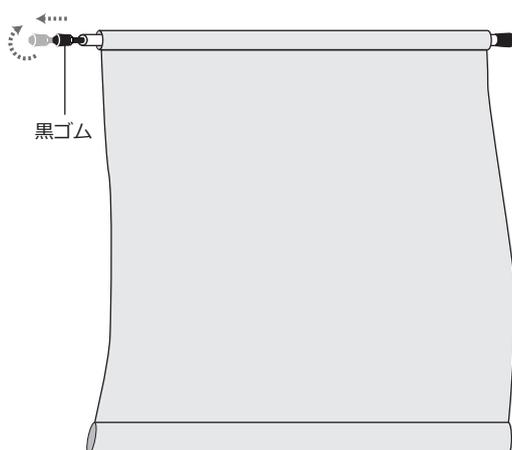

③ 市販のスパナ (M8 用 /13mm) で、ぐらつかない程度に固定してください。

- ※ 黒ゴムを回しすぎると、壁等を破損する恐れがあります。
- ※ 設置面 (壁等) に黒ゴムの色が付く事があります。目立たない箇所を試してからご使用ください。

