


プレミアムボディマット TB-1390

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

ご使用上の注意	屋外または直射日光下でのご使用は、製品を劣化させる原因となりますのでお避けください。
	火気に近づけないでください。変質・変形・火災などの原因となります。
	空調機（エアコン・ストーブ等）からの排気が直接あたる場所でのご使用はお避けください。製品の劣化または故障の原因となります。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因となります。
	製品は適切な揮発処理を施しお届けしておりますが、原材料等のボンド臭が滞留している場合がございます。ご購入日から2～3週間程度は設置場所の換気にご注意ください。
レザーのお手入れは、柔らかい清潔なウエス（布）でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、メディックリーナーまたは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。	

各部の名称

プレミアムボディマットは、患者様をより自然な状態の姿勢で、かつ快適な体位で身体を支える事を可能にしたトータルリートメントクッションです。柔らかい身体を支えることにより、理学療法、鍼灸、カイロプラクティック、急性期ケア、リハビリテーション、手術及び手術後の患者様などにご使用いただけます。また妊産婦、眼科手術、回復期にある患者様の床ずれ防止、関節や筋肉減圧による腰痛治療、リラクゼーションマッサージなどにもご使用ください。

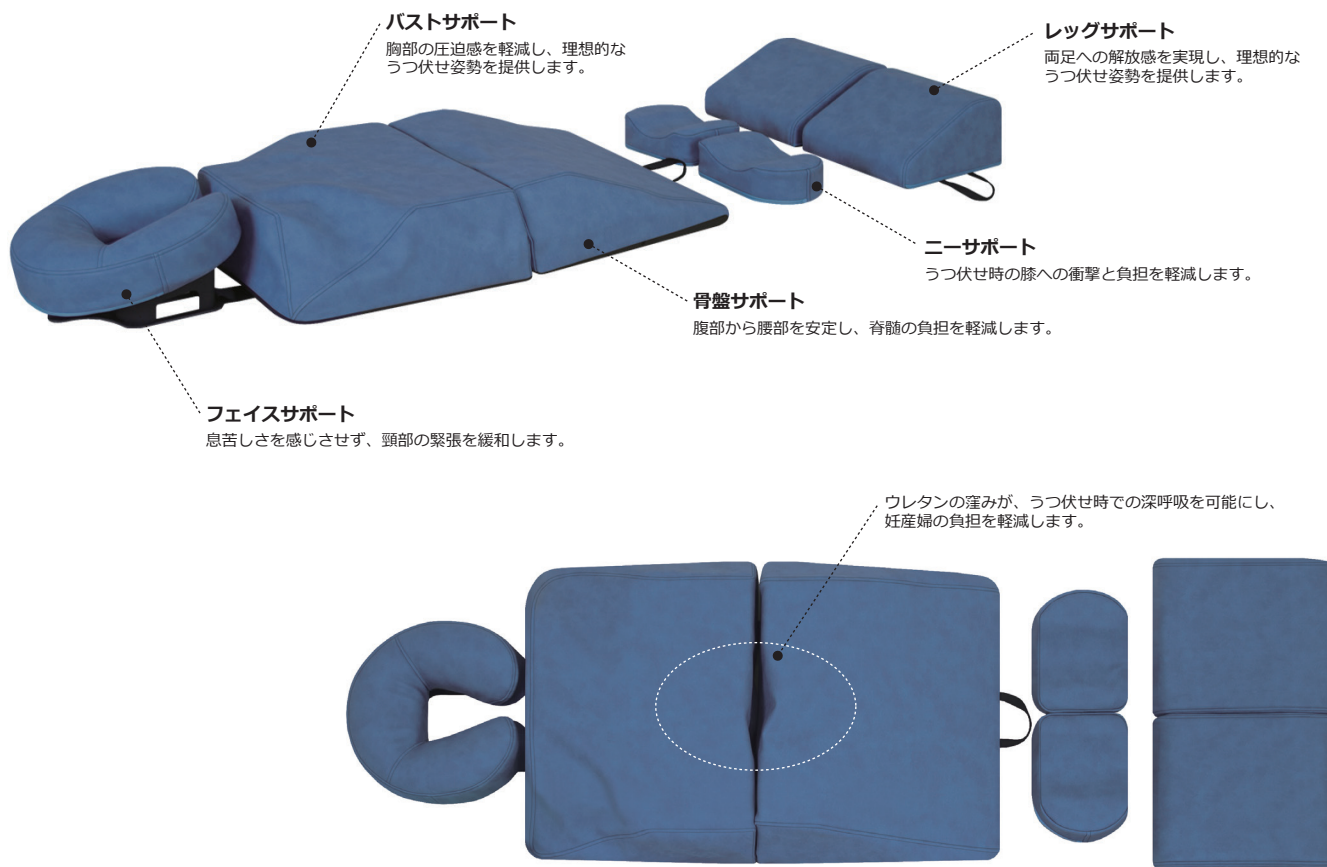

使用方法

うつ伏せ

- ①うつ伏せ用にプレミアムボディマットを用意します。
- ②上前腸骨棘の位置を骨盤サポートの上端へ合わせます。
- ③両脇を外転させて股関節の動きを自由にします。
- ④鎖骨の位置をバストサポートの上端へ合わせます。
- ⑤レッグサポートの斜面の端を頸骨の下部に合わせます。
- ⑥両腕は横に置いて肩甲骨が外側に動けるようにします。
- ⑦フェイスサポートは頸部外側の屈曲・伸展を可能にします。



仰向け

- ①仙骨部を骨盤サポートの中央傾斜部に合わせます。
- ②頭部をバストサポートの上端部に合わせます。
- ③腰部に少し傾斜をつけることで股関節への圧迫を緩和します。
- ④レッグサポートの傾斜面を両大腿部の下に合わせます。
- ⑤鎖骨の伸展はフェイスサポートで調節することが出来ます。
- ⑥骨盤サポートの腹部のくぼみから脊椎へアクセス出来ます。
- ⑦バストサポートの胸のくぼみは頭部を外側へ屈曲・伸展させた時の固定となります。



横向き

- ①バストサポート・骨盤サポートを切り離して肩と腕の位置を調節します。
- ②ニーサポートは両脚の間もしくは大腿部にはさんで使うことができます。
- ③肩へかかる圧迫を除去し快適な体位を提供します。



Option ※別売

プレミアムボディマット用綿製カバー C-1390 ¥15,000 (税別)

- プレミアムボディマット専用設計された上質な綿製カバー。
- 綿 100%生地仕上げ。
 - 取り外しが簡単で、洗濯による極端な縮みの心配がありません。



ピローバッグ (特大) TB-1187-03 ¥8,000 (税別)

- プレミアムボディマットの運搬に便利な収納用バッグ。
- サイズ/幅: 60cm 奥行: 33cm 高さ: 55cm
 - 材質: ナイロン 100% 裏: PVC (塩化ビニル) 加工

