

取扱説明書



Mスポーツ70 TB-1424

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	座シート	1		脚部	4
				トルクスネジ	8
				トルクスレンチ	1

株式会社 高田ベッド製作所



〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
 TEL. 072-484-8800 (代)
 URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
 お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

組立方法

● 組立時間：約 10 分


①下図のように、脚部の向きに注意して組み立ててください。

②ベッドの内側から、トルクスネジで脚部を取り付けてください。

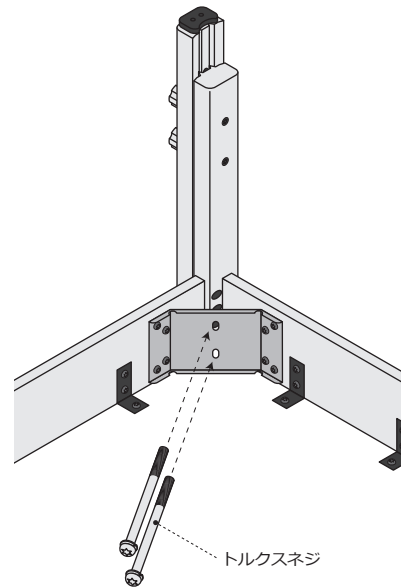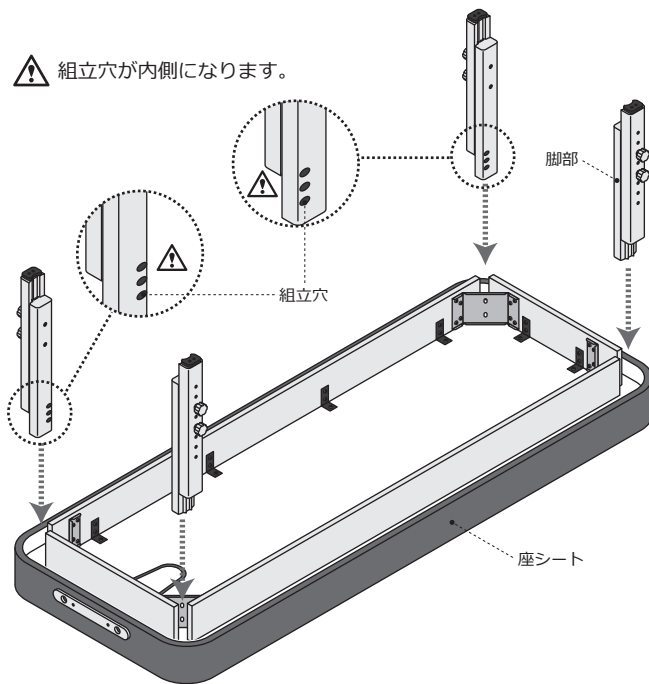

脚部の高さ調節方法

- ⚠ 脚部 4 本の高さが全て同じ位置になっているか必ず確認してください。1 カ所でも位置が異なった状態で使用すると、ベッドが破損する恐れがあります。ご注意ください。
- ⚠ 必ず 2 カ所のノブネジを締めてご使用ください。1 カ所だけ締めた状態で使用すると、脚部が破損する恐れがあります。ご注意ください。

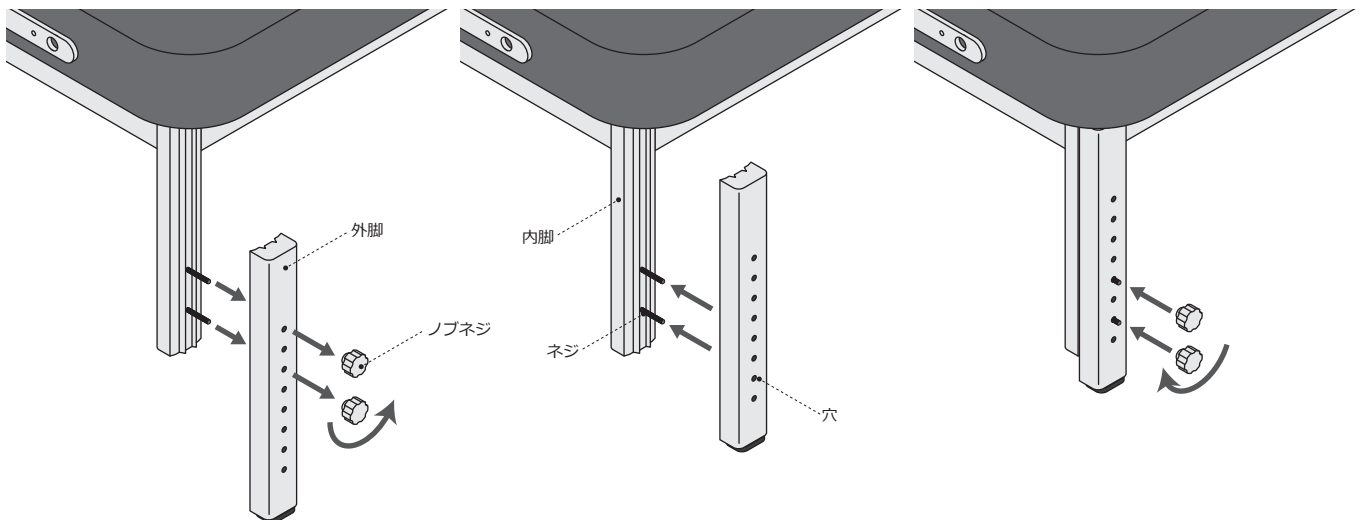

①ノブネジ (2 カ所) を反時計回りに回し、ノブネジ・外脚を外してください。

②ご希望の高さに外脚を調節し、外脚の穴 (2 カ所) に内脚のネジを差し込んでください。

③ノブネジをしっかりと締めてください。