取扱説明書

Takada Bed

カラーホールドミット TB-1436

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

小ご使

屋外または直射日光下でのご使用は、製品を劣化させる原因となりますのでお避けください。

火気に近づけないでください。変質・変形・火災などの原因となります。

空調機(エアコン・ストーブ等)からの排気が直接あたる場所でのご使用はお避けください。製品の劣化または故障の原因となります。

本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因になります。

レザーのお手入れは、柔らかい清潔なウエス(布)でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、メディクリーナーまたは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。

使用方法

①下画像のようにカラーホールドミットを 置いてください。 ②内側のバンドに手を通してください。

③運動器具のグリップ等を握り、手首を マジックテープで固定してください。







④指先を巻き込んでください。

⑤最後にマジックテープで固定してください。





〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27 TEL. 072-484-8800 代

URL http://www.takada-bed.co.jp/

お客様相談室: フリーダイヤル 0120-62-2382