

## ブロードチェアー TB-1468

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	本製品を設置する際は、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと転倒する恐れがあります。 改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>注意</b>	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
<b>注意</b>	可動部を調節する際、指などを挟まないようご注意ください。
<b>注意</b>	ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
<b>注意</b>	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。


## 各部の名称




# 組立方法

● 収納時は逆の手順で収納してください。


①収納バンドを外し、付属マクラと大型肘置き台を外してください。

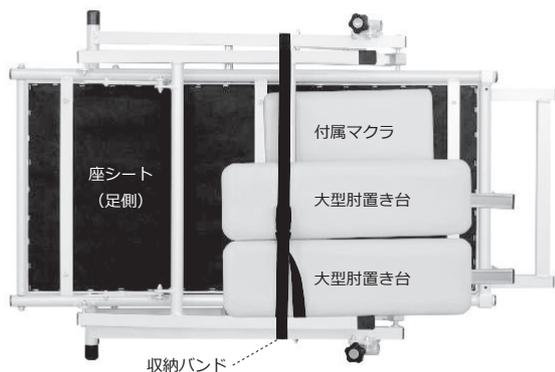


②中脚・脚部（背側）を回転させ、③画像のように広げてください。

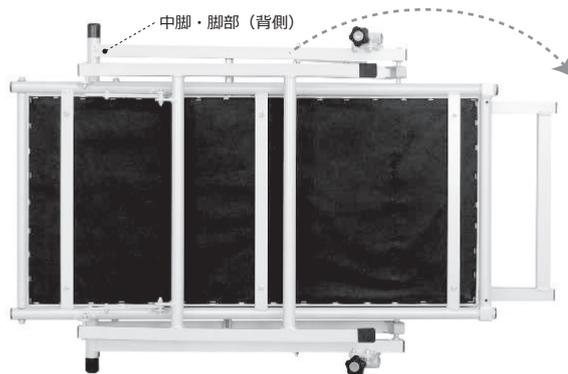


③次に座シート（背側）を回転させ、④画像のように広げてください。

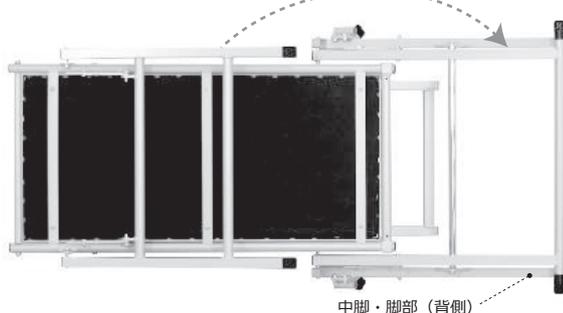


④脚部（足側）を起こし、中脚・脚部（背側）を広げてください。

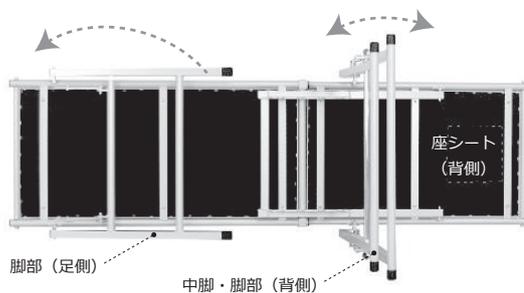

⑤下画像のように背部調節用アングルを脚部（背側）の丸棒に引っ掛けてください。

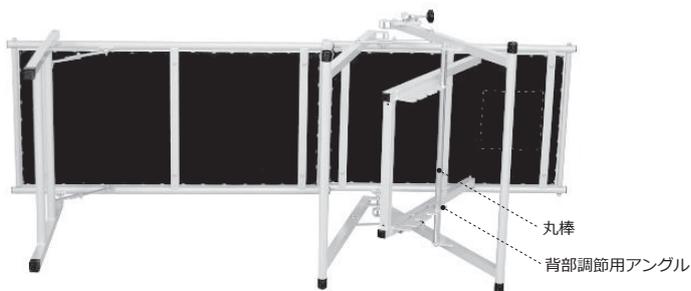

⑥ベッドを起こし、脚部のステー（4カ所）がしっかりとロックされている事を確認してください。

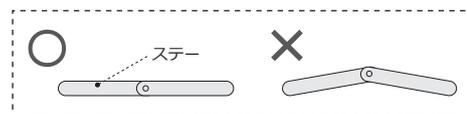

⑦ ①で外した、専用マクラ・大型肘置き台を取り付けてください。ノブネジ（上下用）をゆるめ、大型肘置き台を差し込んでください。



⑧完成。座シート（背側）をご希望の角度に調整してご使用ください。




## 各部の操作方法

### 【大型肘置き台の高さ調節方法】

ノブネジ（上下用）をゆるめる事で、大型肘置き台の高さを調節できます。ご希望の高さに調節し、ノブネジを締め大型肘置き台を固定してください。

### 【座シート（背側）の角度調節方法】

座シート（背部）を片手で持ちながら背部調整用アングルを持ち上げて、丸棒から外してください。ご希望の角度で背部調整用アングルを丸棒に引っ掛けてしっかりと固定してください。

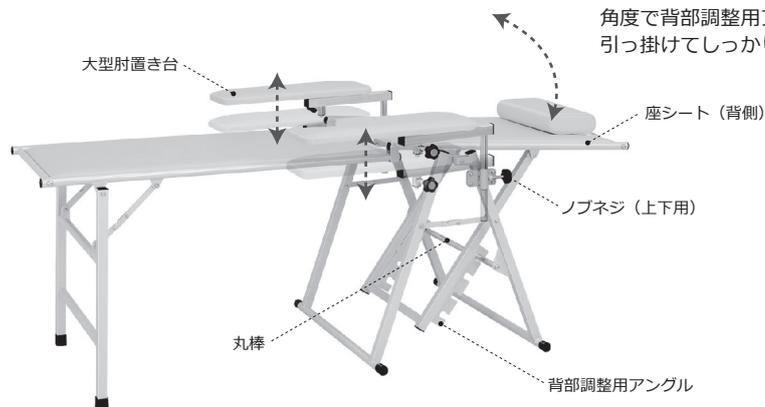

### 【大型肘置き台の角度調節方法】

ノブネジ（回転用）をゆるめる事で、大型肘置き台の角度を調節できます。ご希望の角度に調節し、ノブネジを締め大型肘置き台を固定してください。