

## 感染防止パネルⅢ型

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	本製品を設置するには、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

<b>注意</b>	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

## 組立方法

- ① プラスドライバーでベース板に縦パイプを取り付けてください。(3カ所)
- ② グリップを締めて、縦パイプ(内)を約50cm引き上げて固定してください。
- ③ 横パイプを、透明ビニールシートに通してください。
- ④ プラスドライバーで、横パイプと縦パイプ(内)を取り付けてください。(3カ所)

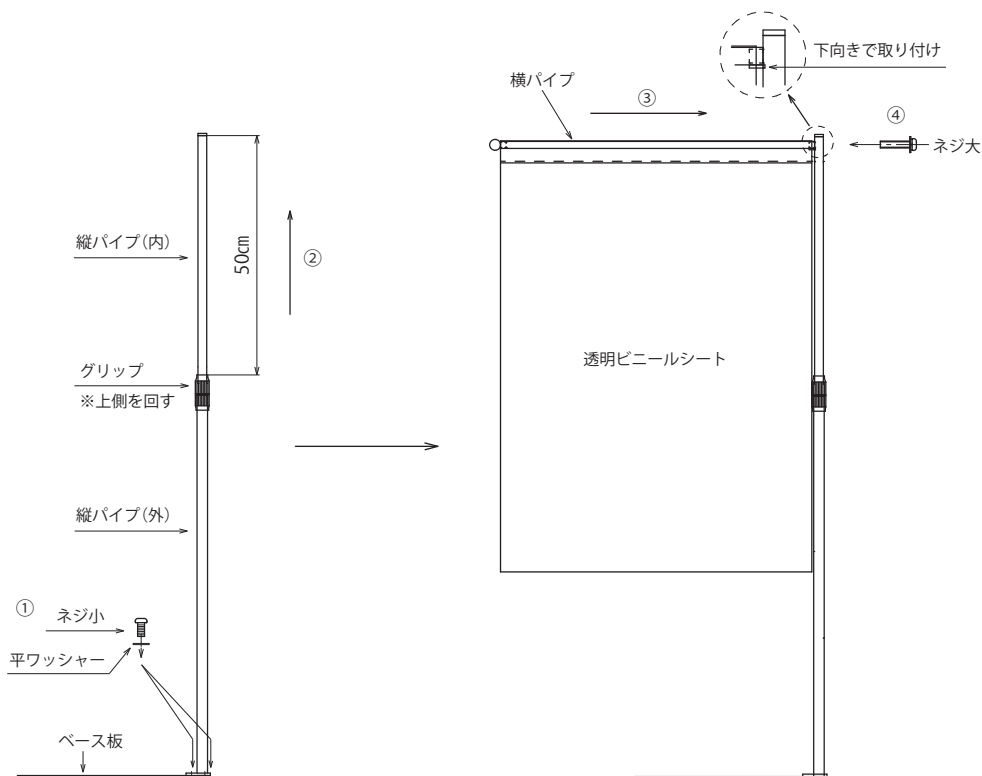

※ネジを締め付ける時は、支柱と横パイプの隙間をなくし、ガタつかない程度に締め付けてください。ネジを締めすぎると支柱が変形する可能性があります。  
 ※透明ビニールシートの巻きジワは、設置後数日でなくなります。お急ぎの場合は、アイロンで巻きジワを伸ばしてから設置してください。