

取扱説明書



検査用3面スクリーン TB-1556

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。






区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置するには、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

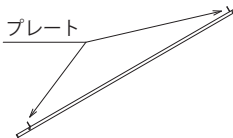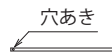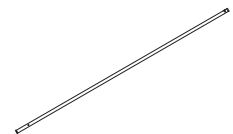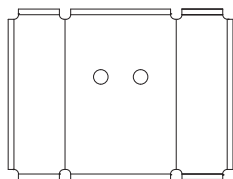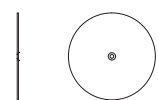部 品 図	部 品 名	個 数	部 品 図	部 品 名	個 数	部 品 図	部 品 名	個 数
	支柱 A	2		横ハリ A	2		ボルト (大)	8
				横ハリ B	4		皿ネジ	2
	支柱 B	2		ビニールシート	1		鍋小ネジ	4
							キャップ	4
	脚部	2					スパナ	1
							平ワッシャー	8
							ボルトキャップ	8

株式会社 高田ベッド製作所


〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

組立方法

● 組立時間：20 分～40 分 ※お二人以上での組立をお薦めします。

■正面スクリーンの組立

①下図のように支柱 A に横ハリ B を取り付け後、正面ビニールシートに通してください。※穴あき側が上に来るように通してください。

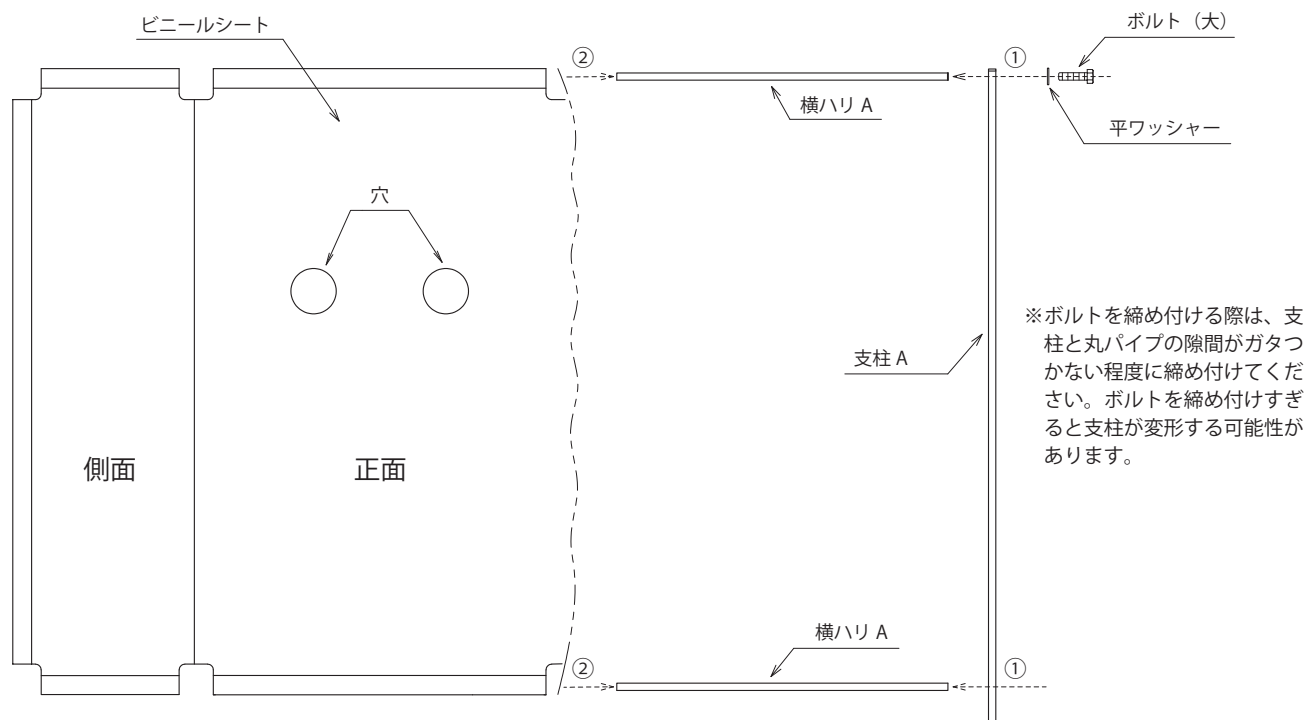


※ボルトを締め付ける際は、支柱と丸パイプの隙間がガタつかない程度に締め付けてください。ボルトを締め付けすぎると支柱が変形する可能性があります。

②もう片側も同様に組み立ててください。

■側面スクリーンの組立



①下図のように支柱 B に脚部を取り付けてください。※2 セット組み立ててください。※プラスドライバーが必要です。

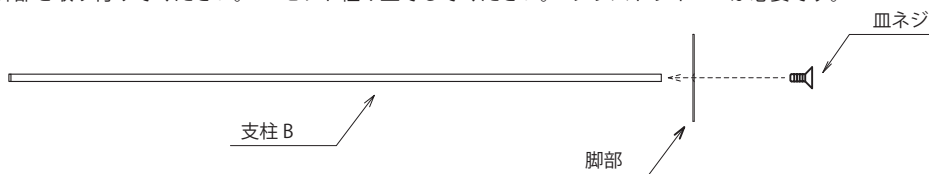

②下図のように側面ビニールシートへ支柱 B・横ハリ B を通してから支柱 B へ横ハリ B を取り付けてください。
※両側組み立ててください。

③横ハリ B にキャップをはめ込んでください。

④支柱 A を差し込んで取り付けしてください。

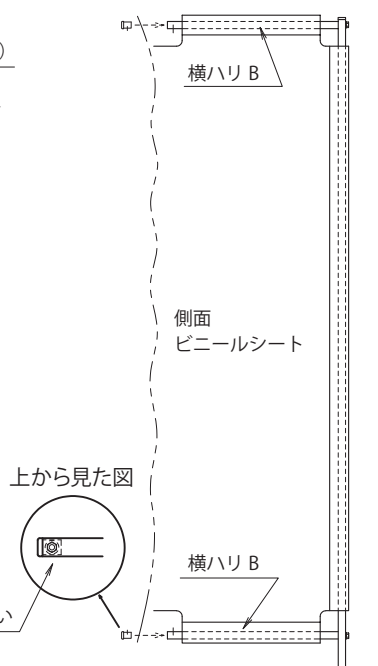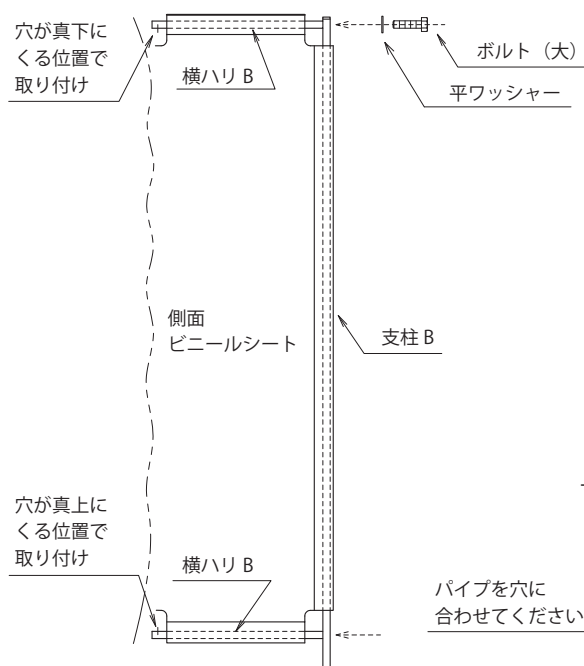


上から見た図

パイプを穴に合わせてください



■ガタつき確認後、ボルトキャップ（8カ所）を取り付けてください。

組立後、製品がガタつく場合は、本製品を立てた状態でボルト（大）をゆるめ、ガタつきが無くなるよう調節してください。
全ての土台が床に設置している事を確認しながら、ボルト（大）ゆっくり締めつけてください。

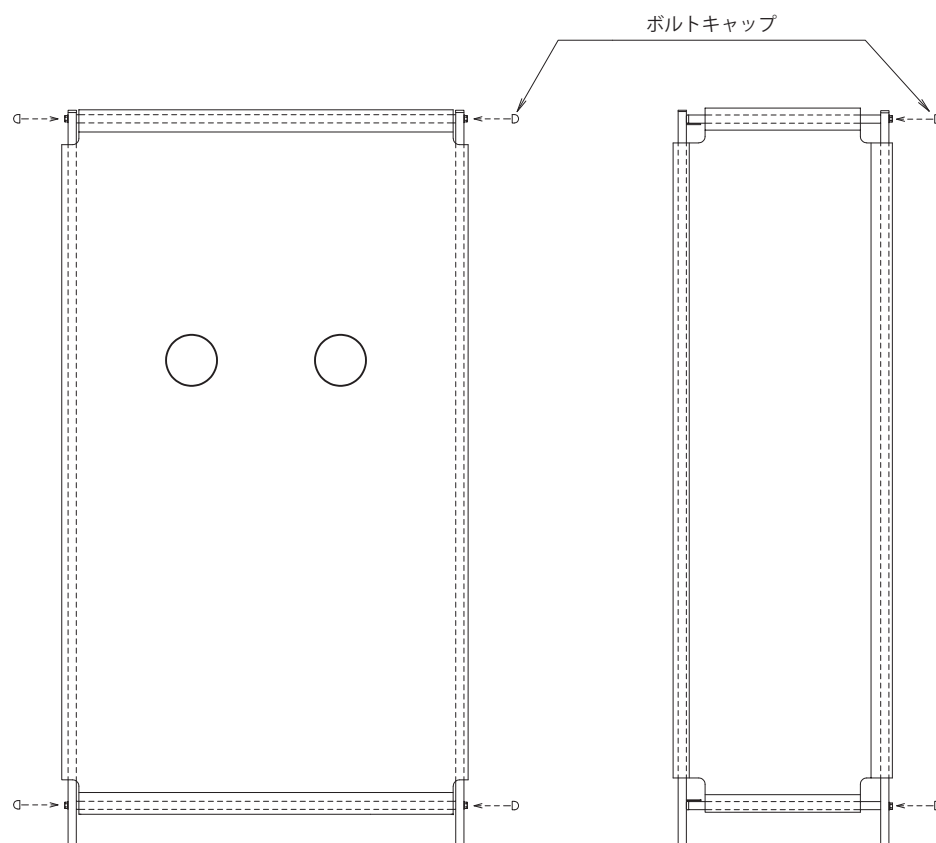

※透明ビニールシートの巻きジワは、設置後数日でなくなります。
お急ぎの場合は、アイロンで巻きジワを伸ばしてから設置してください。