

感染防止スクリーンⅢ型

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。









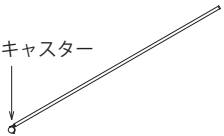



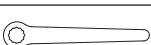



区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

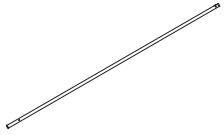警告	本製品を設置するには、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

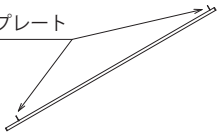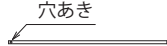注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。


部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	支柱 A	2		横ハリ A	2		ボルト(大)	6
	支柱 B	1		横ハリ B	2		ボルト(小)	2
				脚	2		鍋小ネジ	2
	支柱 C	1		ビニールシート 大・小 各 1	大・小 各 1		キャップ	2
							ジョイント	2
							スパナ	1
							平ワッシャー	6
							歯付ワッシャー	2
							ボルトキャップ	6

組立方法

● 組立時間：20分～40分 ※お二人以上での組立をお薦めします。


■スクリーン1の組立

①下図のように支柱Aに横ハリAを取り付け後、ビニールシート(大)を通してください。

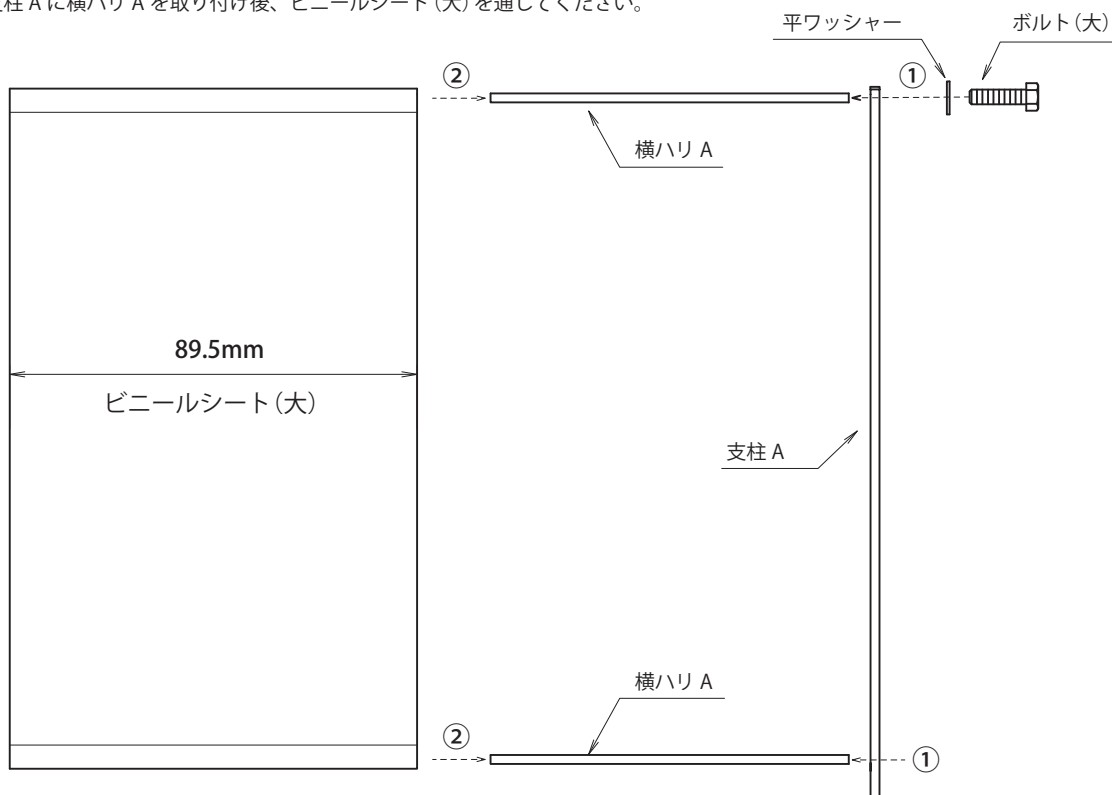


※ボルトを締め付ける際は、支柱と丸パイプの隙間を無くしガタつかない程度に締め付けてください。
ボルトを締めすぎると支柱が変形する可能性があります。

②もう片側に支柱Aを取り付け後、下図のように脚部を取り付けてください。

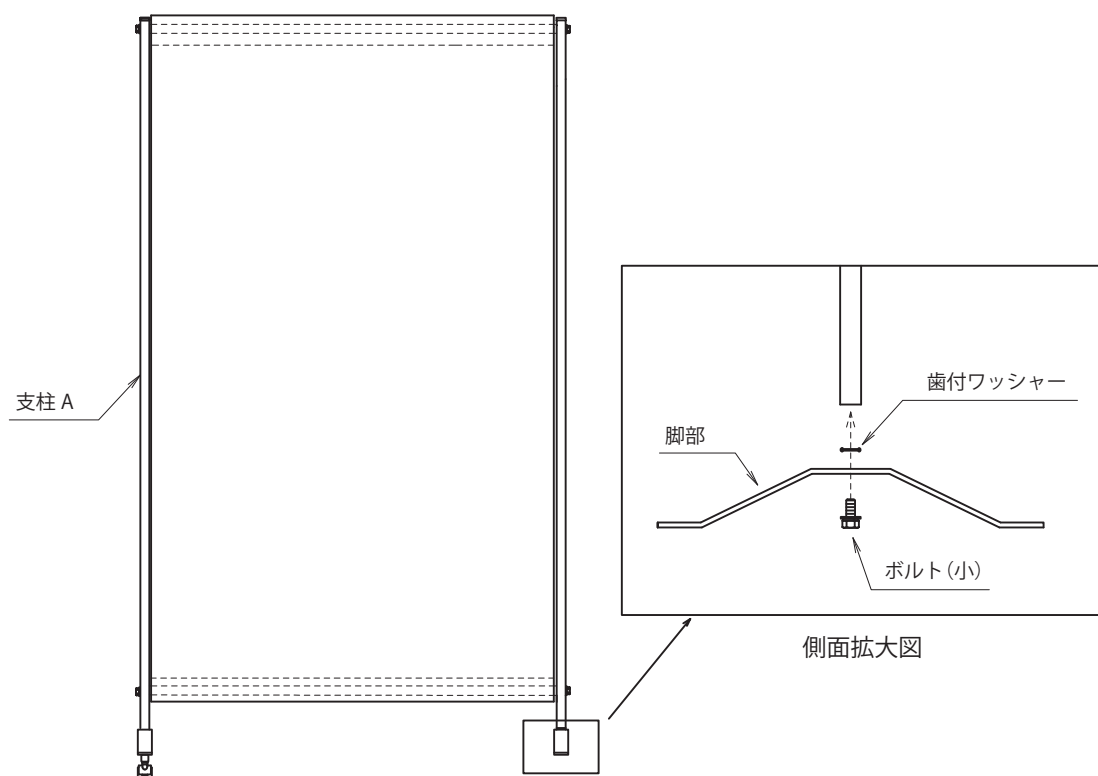



■スクリーン 2 の組立

①下図のように支柱 C に横ハリ B を取り付け後、ビニールシート (小) を通してください。
 ※横ハリ B の穴向きに注意して取り付けてください。

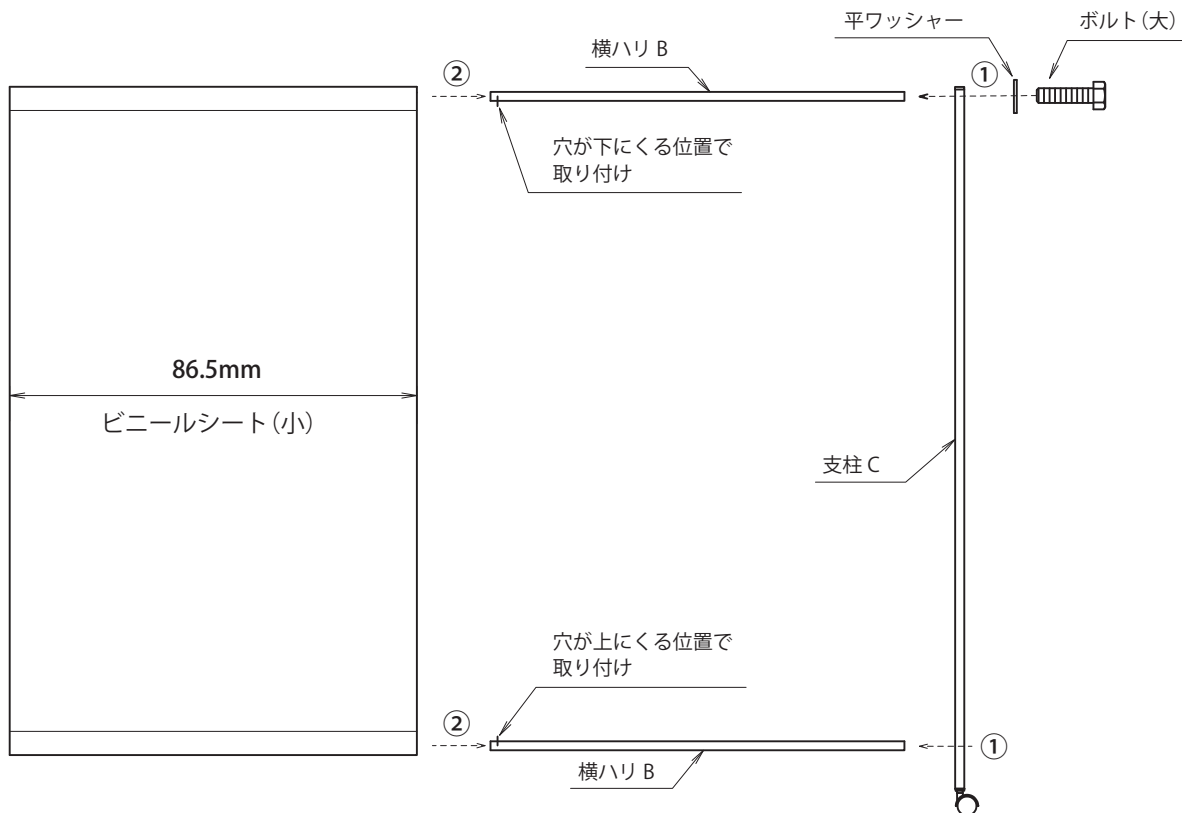


②横ハリ B にキャップをはめ込んでください。

②支柱 C を差し込んで取り付けしてください。
 ※プラスドライバーが必要です。

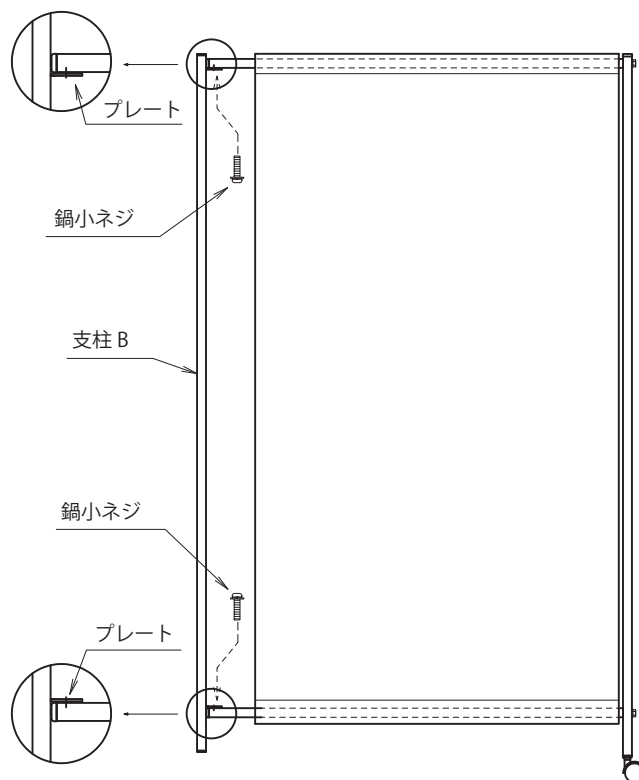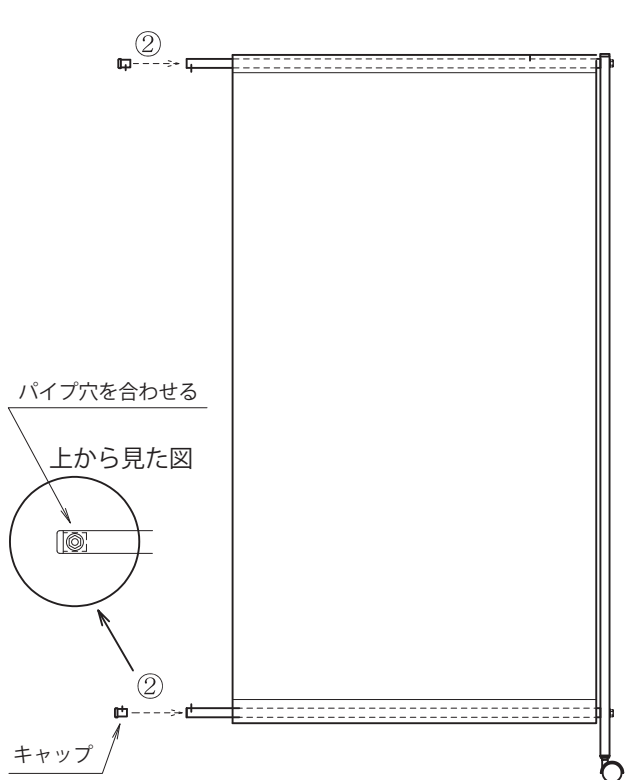

■スクリーン1・2の組立

※スクリーン1にスクリーン2をジョイントで取り付けてください。

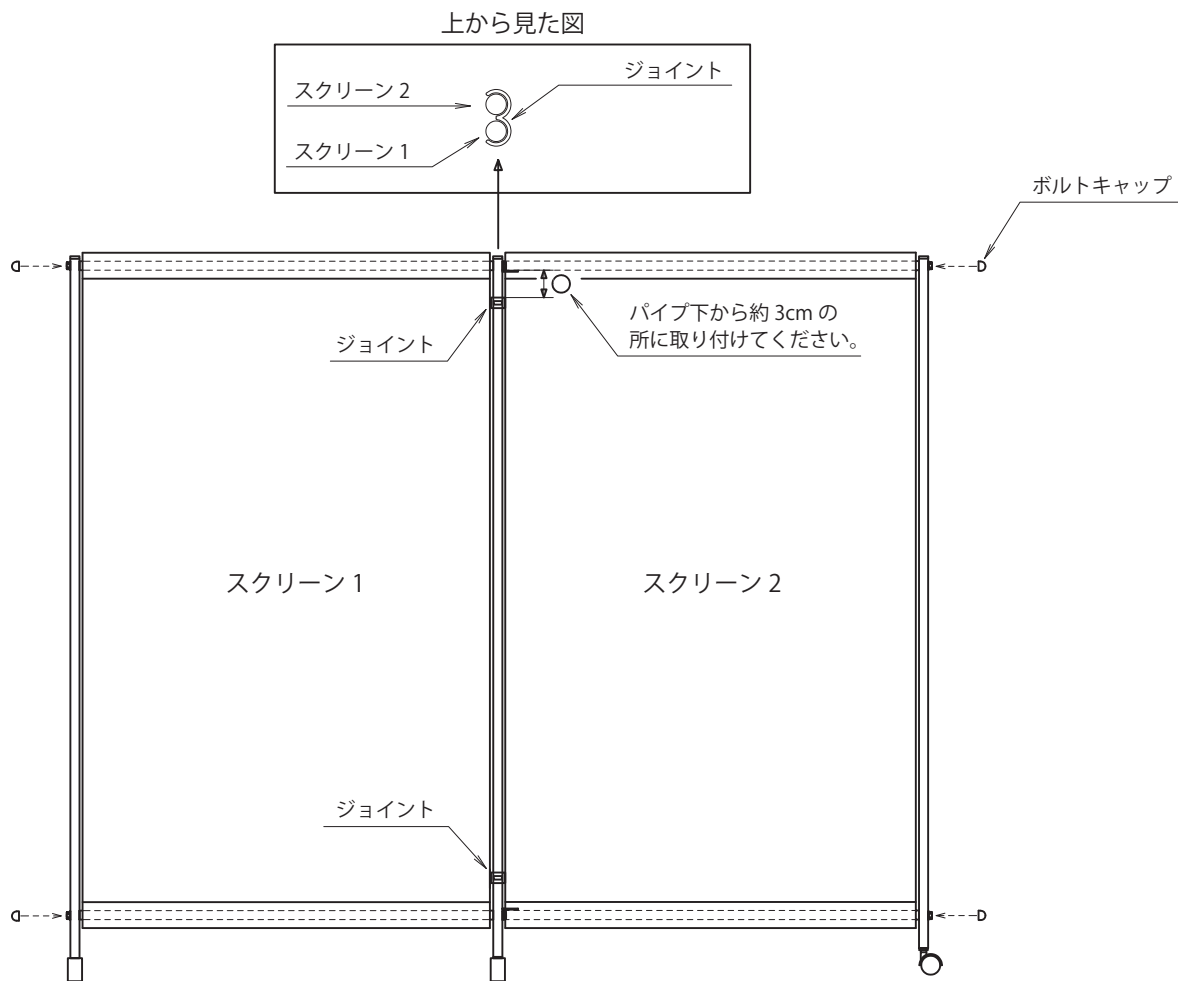

■ガタつき確認後、ボルトキャップ(6カ所)を取り付けてください。

組立後、製品がガタつく場合は、本製品を立てた状態でボルト(大)をゆるめ、ガタつきが無くなるよう調節してください。全ての土台が床に設置している事を確認しながら、ボルト(大)ゆっくり締めつけてください。

※透明ビニールシートの巻きジワは、設置後数日でなくなります。
お急ぎの場合は、アイロンで巻きジワを伸ばしてから設置してください。