

ナーステーブル E V・ナーステーブル E W

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

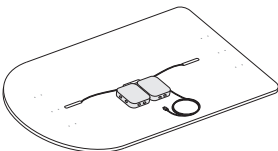
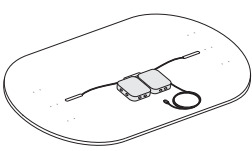
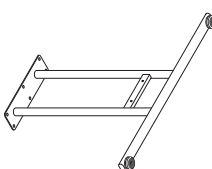
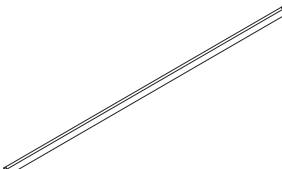

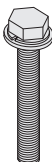


区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	本製品に水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。

注意	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	交流 100V 以外でのご使用はしないでください。感電や発火の原因となります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいようお願いいたします。

部品一覧表

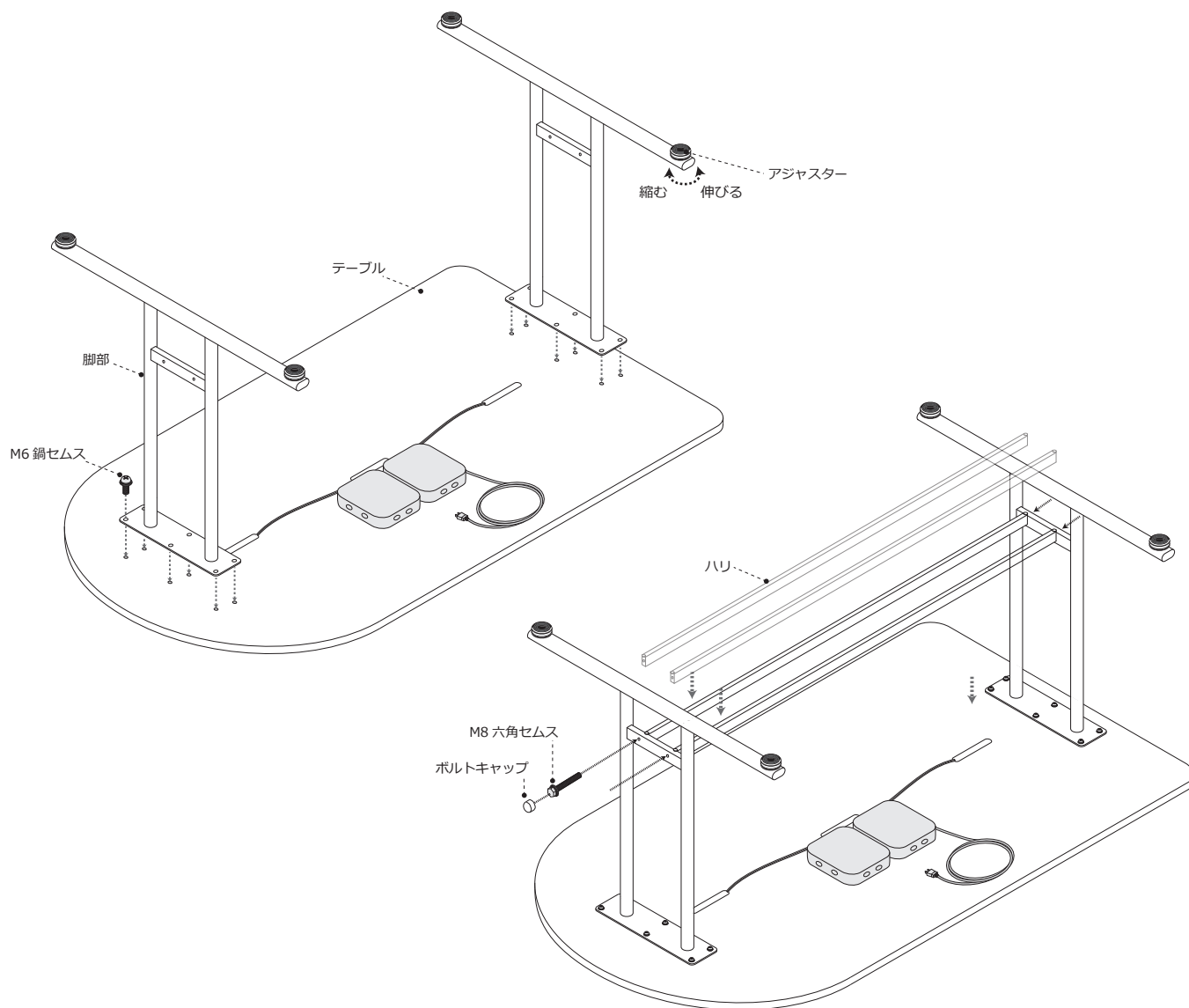
● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

テーブル (E V)	テーブル (E W)	脚部	ハリ
			
1	1	2	2
スパナ	M8 六角セムス	M6 鍋セムス	ボルトキャップ
			
1	4	12	4

各部の名称及び組立方法

①下図のようにテーブルを裏返し脚部を
テーブルのネジ穴に合わせ仮止めしてください。

②脚部とハリを六角セムスで固定します。
※付属のスパナでしっかりと締めてください。その後
付属のボルトキャップをボルトに被せてください。
その後、①で仮止めした鍋セムスをしっかりと締めてください。

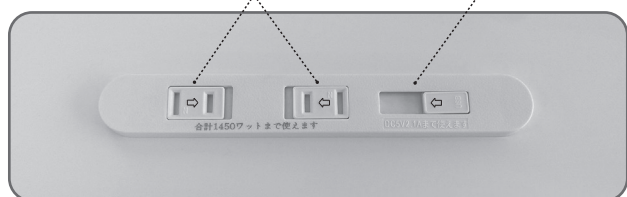


コンセント差し込み口

差し込みたい電源プラグのピンを溝に合わせて沿わせ
矢印の方向にスライドさせれば差し込み穴が出てきますので
その状態で電源プラグを奥まで差し込んでください。

USB ポート

ほごりカバーを矢印の方向にスライドさせれば
差し込み穴が見えてきますのでその状態で
USB を奥まで差し込んでください。



定 格	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 20A 出力 : 5VDC2.1A
最大出力	AC(コンセント) は合計 1450W まで
コード	電源コード 2.5m

⚠ ※最大出力の合計 1450W は全てのコンセント差込口の合計数です。
ご注意ください。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382