

取扱説明書



3 Mデンタルチェアー TB-1693


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。


<

</

各部の名称と使用方法

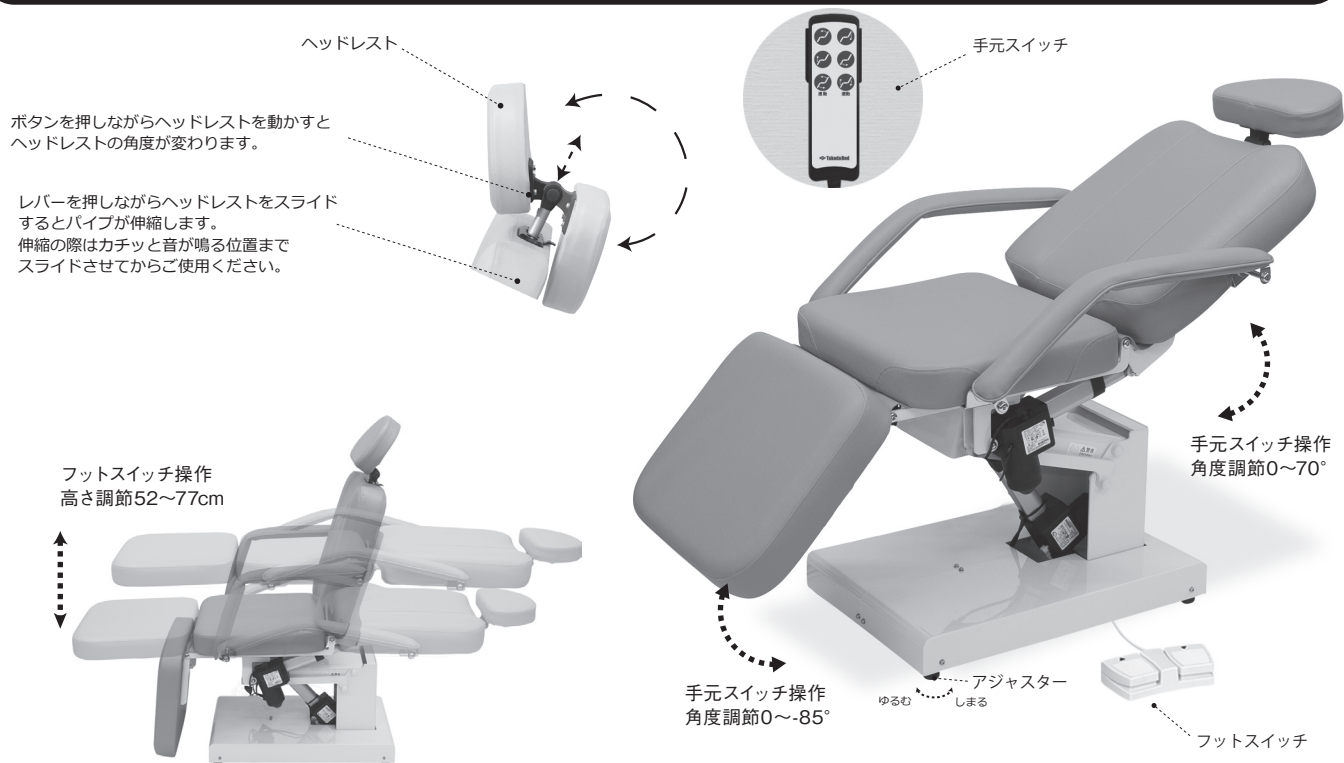

手元スイッチの操作方法

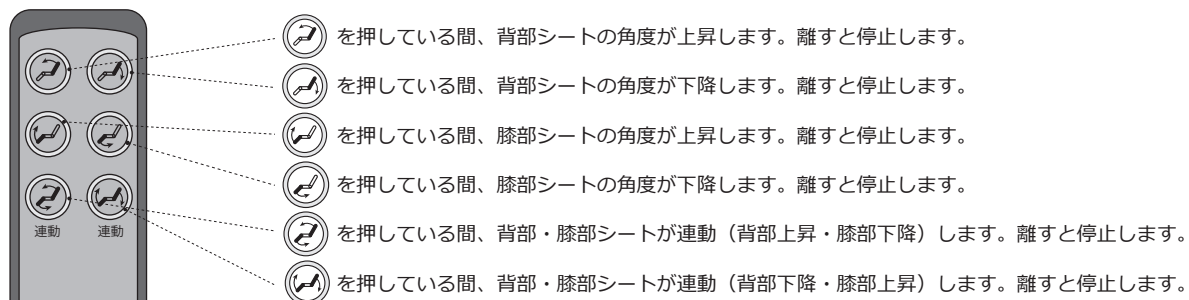

フットスイッチの操作方法

▲上昇 ▼下降


踏んでいる間作動し、離すと停止します。

※スイッチの中央を真上から踏んでください。



斜めに踏むと作動しない場合があります。

【使用上のご注意】

ベッド内部に手足を挟まれる危険性があります。高さを操作中には、周辺に挟まれる危険性のある物、または患者さんなどの人が近づかないよう十分ご注意ください。

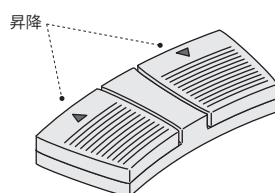



差込向きに注意して、フットスイッチコードを差し込んでください。

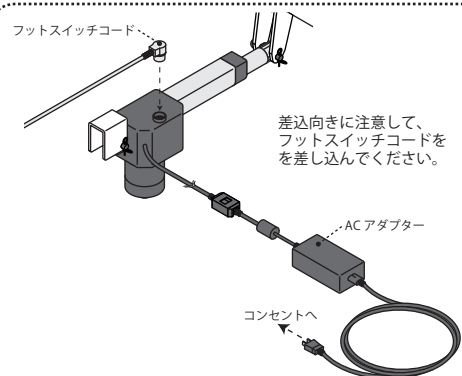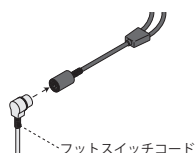

アームレストの取付方法

※プラスドライバーが必要になります。

付属のボルトで、背部・座部裏側にアームレストをしっかりと取り付けてください。
※背部を少し上げた状態にすると取付やすくなります。
※ボルトはしっかり締め込んでください。アームレストがはずれて事故の原因となります。

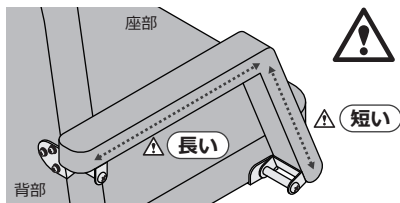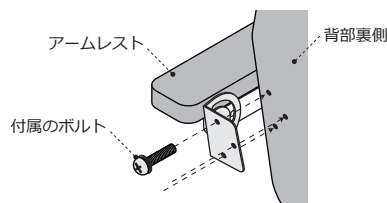

⚠ アームレストは必ず下図のように、折れ曲がる箇所から長い方を背部、短い方を座部に取り付けてください。
※反対側に取り付けると、事故の原因となります。


モーターの仕様

●中国製モーター

電 源	入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC29V
消費電力（6000N 負荷時）	MAX：約 240W / 1A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒 下降：約 25 秒
最大耐荷重	150kg
フットスイッチコードの長さ	3m
電源コードの長さ	4m

定期メンテナンスのお願い

●快適にお使いいただくために

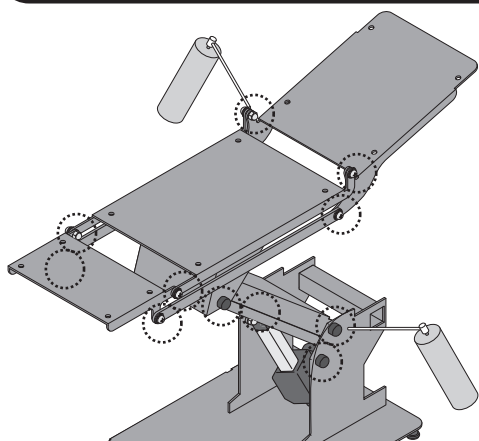

●市販の潤滑スプレー又はグリーススプレーで、3ヶ月を目安に左記の可動部分に適量を吹き付けてください。
吹き付けを怠ると、がたつきや摩擦音の原因となります。

※回転部分またはボルト部分に市販の潤滑スプレーを吹き付けてください。
※吹き付けた際に潤滑油の飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等をあててご使用ください。
※市販の潤滑スプレーは、記載の使用方法をよく読んでから取り扱ってください。
※万一摩擦音が発生した場合、吹き付けにより軽減しますが浸透するまでに2～3日かかります。軽減されない場合は、ご購入代理店にお申し付けください。

○ 摩擦音の発生する箇所

修理を依頼する前に

●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状		ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	電源が入らない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
		電源コードが断線していませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
	電源が入っている	フットスイッチが断線していませんか？	フットスイッチの交換が必要です。
		連続して昇降操作をしていませんか？	取扱店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある		アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382