

TB-1740 松葉杖ラック

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

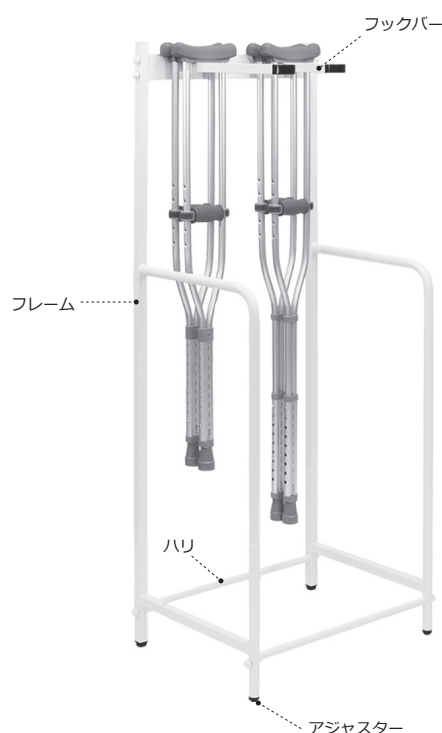
区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

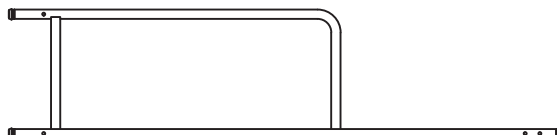
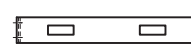
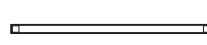
注意	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合、ご購入代理店に相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。

各部の名称・部品一覧表

● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。



※松葉杖は付属していません

フレーム		
		
2		
フックバー	ハリ	
		
1		2
六角セムス	ボルトキャップ	スパナ
		
8	8	1

組立方法

- ①下図のように、フレームとフックバー、ハリを六角セムスで仮止めします。
- ②全てのボルトを仮止めし、その後付属のスパナで本締めをしてください。
※水平な床面で作業を行ってください。(水平ではない場所で作業すると歪みやガタツキの原因となります。)
- ③ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。

