

取扱説明書

 **Takada Bed**

パーソナルキャリー TB-1753

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	製品をリクライニングする場合は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。製品に挟まれ、人身事故や物損事故等の原因になります。



注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆりみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	本製品の用途以外には使わないでください。事故や故障の原因になります。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整をしてからご注意ください。故障や破損の恐れがあります。
	可動部を調節する際、指などを挟まないようにご注意ください。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。

リクライニング操作方法

●ご使用前に必ずお読みください。

リクライニングは12段切り替えになっておりますので、お好みの角度でご使用ください。
「カチッ」と音がしたところで止めますと固定できます。

水平に戻すには、背部側を90°以上前方に倒すとロックが解除され水平に戻せます。

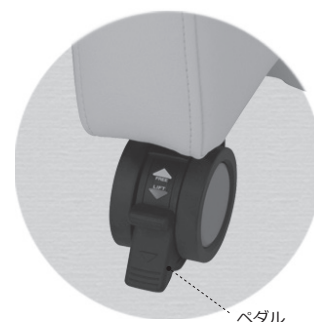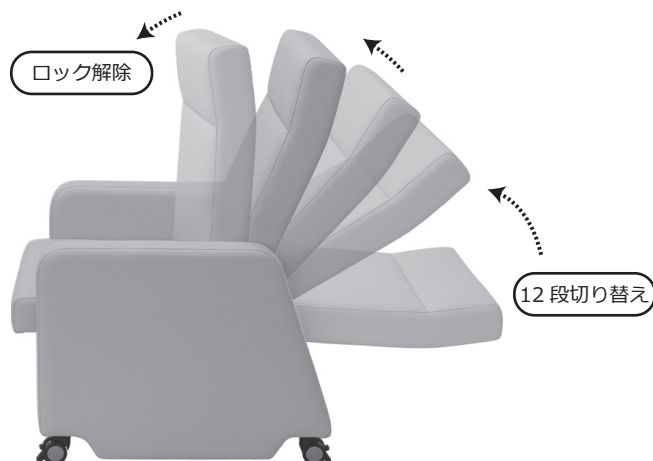

【固定する場合】

ペダル（4カ所）を下ろします。
ペダルを下ろすと、キャスター本体がグッと持ち上がります。

【動かす場合】

下ろしたペダル（4カ所）を上へ引き上げます。
キャスターが床に接地し、移動できます。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL. 072-484-8800 (代)
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382